

充実のアクセサリ
ラインアップ



ロックボックス・ポンプポーチ等



ポンプ用ポーチ 品番: JM-IFPPOSB

小容量タイプ

機器本体と薬液等をコンパクトに収納できるソフトポーチ。不用意に薬液の取り出しができないよう、鍵をかけて管理することができます。



ロックボックス 品番: JM-IFPLBH



大容量タイプ

機器本体と薬液等を収納し、不用意に薬液の取り出しができないよう、鍵をかけて管理することができます。

ロックボックス用ポーチ 品番: JM-IFPPOBK



ロックボックスを収納し、右ポケットにはPCAボラスボタンを収納することができます。

ショルダーストラップ 品番: JM-IFPSS

ロックボックス・ロックボックス用ポーチに接続することができます。



その他

ボラスボタンカバー 品番: JM-IFPBBC



PCAボラスボタン先端部に装着し、先端部を保護します。

バッテリー充電器 品番: JM-IFPBC



アイフューザー プラス用バッテリー専用の充電器です。

通信ボックスセット 品番: JM-IFPCB



機器本体に接続し、パソコンに履歴をダウンロードします。パソコンで3,000件まで履歴を確認することができます。

主な製品仕様

販売名	アイフューザー プラス
品番	JM-IFB(本体色:ブルー)、JM-IFP(本体色:ピンク)
作動原理	ロータリ・ペリスタルティック
投与精度	±5%(総投与量 4L まで) / ±10%(総投与量 4~8L 以内)
投与速度設定範囲	0.1 ~ 999mL/h
予定量設定範囲	1 ~ 9,999mL
投与量設定範囲	0 ~ 9,999mL
プライミング速度	1,000mL/h 以上
KOR 速度	0.0 ~ 9.9mL/h
ボラス投与速度	120mL/h
ボラス量設定範囲	0.1 ~ 6.0mL
閉塞検出圧力切替	LOW 設定: 20 ~ 60kPa / HIGH 設定: 60 ~ 100kPa
警報機能	電池電圧、閉塞圧(吸入・吐出)、気泡、操作忘れ、待機、投与完了、モータ異常、カセット外れ、カセット異常、システム異常
安全機能	誤設定防止機能、投与速度/予定量大小判定機能、セルフチェック機能、気泡検出感度・閉塞検出圧力切替機能、投与速度上限値設定機能、パネルロック機能、プログラムロック機能
電源	AC100V 50/60Hz 21VA、内臓電池(リチウムイオン電池)
連続バッテリー動作時間	72 時間以上(新品バッテリー満充電時: 5mL/h・周囲温度約 25℃・バッテリー節約モード)
電撃保護形式	クラスⅡ機器、内部電源機器
電撃保護程度	CF 形装着部
防滴性	IPX4
寸法	149(幅) × 79(奥行) × 49(高さ) mm
重量	420g(バッテリー含む)
付属品	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ①AC アダプタ ②ボールクランプ ③電池カバーオープナー ④カセット台押さえ ⑤バッテリー ⑥本体 (その他) キャリングケース、添付文書、取扱説明書、保証書 ※バッテリーは簡単に取り出して、交換する事ができます。 ※バッテリーの交換は、2 年毎に行ってください。
オプション	PCA ボラスボタン
医療機器承認番号	22100BZX00017000
クラス分類	Ⅲ: 高度管理医療機器(特定管理医療機器該当)
EMC 規格	IEC 60601-1-2:2001 および Amendment:2004、JIS T 0601-2-24:2005

アイフューザー プラス専用輸液セット

品 番	JAN コード	先 端	びん針	エア針	バッグ	フィルタ	備 考	梱包単位		
JE-IFP8CFCL	4987494307616	フリーロック	ブラ瓶針	あり	なし	IVF(輸液フィルタ0.2μm)		10本×5箱 =50本		
JE-IFP8CL	4987494307609					なし				
JE-IFP100CLB	4987494307111		なし	なし	100mL	IVF(輸液フィルタ0.2μm)	ロックボックス用			
JE-IFP150FCWL	4987494308101				150mL		ロックボックス用			
JE-IFP150IMCF	4987494269396				300mL				ロックボックス用	
JE-IFP300CFCL	4987494307128						ロックボックス用			
JE-IFP300CFCB	4987494307142						ロックボックス用			
JE-IFP300CLB	4987494307159				なし					
JE-IFP300CF	4987494284757									

麻酔用アイフューザー輸液セット(承認番号:30100BZX00021000)								
品番	JANコード	先端	びん針	エア針	バッグ	フィルタ	備考	梱包単位
JE-6IFP8CL	4987494314263	ISO80369-6	ブラ瓶針	あり	なし	なし		10本×5箱 =50本
JE-6IFP150CL	4987494313549		なし	なし	150mL			
JE-6IFP300CL	4987494313525				300mL			

※仕様については、改良・改善のため予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス

■お問い合わせ先

製品情報センター ☎0120-901-509 (受付時間: 9:00~17:30)

〒730-8652 広島市中区加古町12番17号

<http://www.jms.cc/>

携帯型精密輸液ポンプ アイフューザー プラス

i-Fusor™ Plus



コンパクトなボディに充実の機能を搭載


i-Fusor Plus

大きな液晶画面に日本語表示、そしてシンプルな操作パネルで使いやすく。
連続投与・PCA投与の2つのモードから投与方法を選択でき、患者様に合わせた投与が可能です。
安全性を重視した設計と機能で、誰にでも安心して使えるように。
—より安全に、使いやすく進化した電動式PCAポンプ アイフューザー プラス

大きな液晶と
シンプルな操作パネル

液晶画面は大きく、操作パネルはシンプルに
漢字およびひらがな表記にも対応

※PCA投与モード 投与中の画面

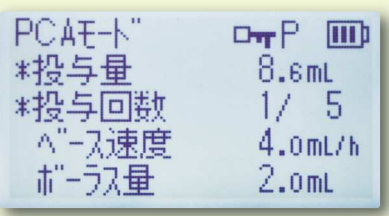

●画面上部のアイコン表示

- ①パネルロック
表示中=ON / 表示なし=OFF
- ②圧力モニタ
圧力小 P P_i P_d P_{il} 大
- ③バッテリー残量表示
残量小 大

選べる2色の筐体

ブルーとピンクの2色展開



本体はブルーとピンクの2色があり、用途に応じて使い分けことができます。
本体色の使い分けによる医療事故防止対策としても有効です。




2つの投与モードから
選択可能



①連続投与モード ②PCA投与モード
治療に応じて投与モードを選択

連続投与モード

速度 時間

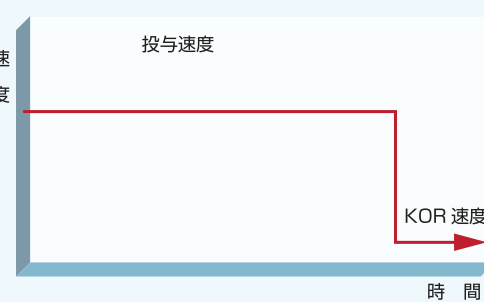


※投与中画面



連続投与モードは、一定の投与速度で持続的に薬液を投与します。
投与が終了すると、ポンプは自動的にKOR速度に切替わります。

PCA投与モード

速度 時間

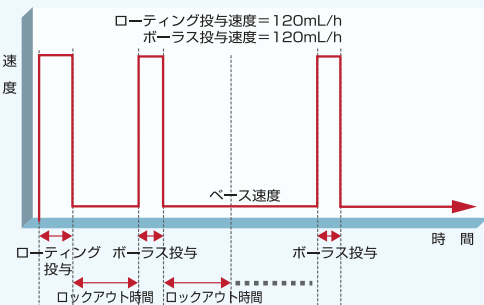


※投与中画面




PCA投与モードは、医師が適切と判断した投与量を、患者様の痛みに応じてボーラス投与することができます。
設定はプリセット設定・ロックレベル設定から選択します。

プリセット設定

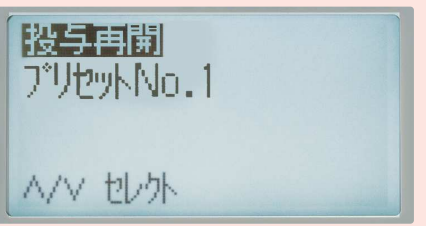

プリセット設定は、あらかじめ設定内容を本体に登録(=プリセット登録)することで、投与時には登録した設定内容呼び出して投与することができる機能です。
プリセット登録は3つまで登録可能です。
登録後は登録内容呼び出せば、細かい設定を行なう必要なく、投与を開始できます。
また、登録内容を変更する際には、パスワード入力等の制限があるため、安易な設定変更を防止します。

ロックレベル設定

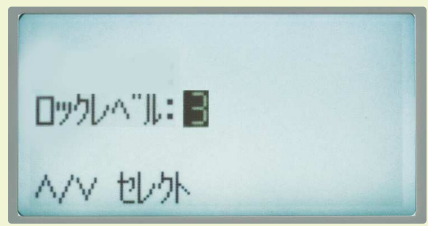

ロックレベル設定は、投与中に許可なく設定の変更が行われないよう設定する機能です。
ロックレベルは0～3までの4段階に分かれています。
ロックレベルを適切に設定することで、患者様に安全な輸液投与を実施します。

PCAボーラスボタン (オプション)



操作性と安全性を考慮した形状のPCAボタン

PCAボーラスボタンを押すとあらかじめ設定した薬液量がボーラス投与されます。

押しやすいよう、本体先端部に窪みをつけ、また押ボタンを内側に配置することで、落下や接触等により、意図しない投与が行われないよう設計しています。



品番:JM-IFPBB (ボタン色:ブルー) / JM-IFPBP (ボタン色:ピンク)

安全性を重視した
設計と機能


ハード面・ソフト面に多彩な安全機能を搭載

セーフロック機能




カセット着脱時のフリースローを防止するため、輸液セットにはセーフロックランプを装備しています。

2箇所の圧力センサ

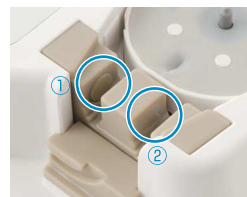

① 吸入側圧力センサ
② 吐出側圧力センサ
2箇所の圧力センサで閉塞を感知します。

わかりやすい警報表示

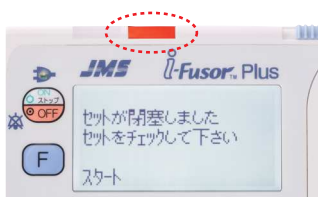

画面に警報内容を表示し、本体上部の警報表示灯が赤く点滅します。

ロック設定



パネルロック機能
操作パネルのキー操作を無効にするように、ロック設定をすることができます。



プログラムロック機能
不用意にプログラムを変更できないように、プログラムをロックすることができます。

パスワードによる設定管理



設定内容の変更や、投与履歴の消去等をおこなう際には、パスワード入力画面が表示され、医師や管理者以外の方による安易な設定変更を防止します。

選べる2色の筐体

投与履歴を本体の画面上で確認可能

ボーラス投与履歴表示機能



PCA投与モード時に、現時点から設定時間内におこなったボーラス投与の要求回数と実際の投与回数を表示します。

投与履歴表示機能



直前の99履歴までの投与履歴(日時)を確認することができます。