

抗がん剤調製クローズドシステム ネオシールド



NEO SHIELD

ネオシールドマルチスパイク

安心の閉鎖性能と
スムーズ操作



安心設計



簡単操作



効率性



シールドバルブシステムによる
高い閉鎖性能

幅広いバイアル適合
(口径13~20mm、口径32mm)

シンプルな構成で
作業効率もアップ

安心・簡単・効率的な 抗がん剤調製を実現する閉鎖式システム

マルチスパイクにより使いやすく、適応の幅が広がります。



■ 操作手順（抗がん剤を希釈液で溶解し、調製する場合）


1 装着 マルチスパイクをバイアルにまっすぐ押し込み ツメが掛かっていることを確認	2 溶解液吸引 レバーロックをシリンジに取り付け、バッグアダプタを 装着した希釈用の輸液バッグより溶解液を採取	3 溶解液注入 陰圧のポンピングで 溶解液を注入
4 空気量調整 希釈用の輸液バッグを用いバイアルからの 採液量に合わせてシリンジ内の空気量を調整	5 薬液吸引 陰圧のポンピングで 薬液を吸引・計量	6 希釈 希釈液の輸液バッグに 注入し、払い出し

■ 規格一覧

 販売名 ネオシールドマルチスパイク 型式: マルチスパイク 品番: JV-NSMS 梱包単位: 25個×8箱=200個 医療機器届出番号: 34B1X00001000096	 販売名 ネオシールドマルチスパイク 型式: マルチスパイク32φ 品番: JV-NSMS32 梱包単位: 25個×10箱=250個 医療機器届出番号: 34B1X00001000096	 販売名 ネオシールドレバーロック 品番: JV-NSLL 梱包単位: 25個×8箱=200個 医療機器届出番号: 34B1X00001000088	 販売名 ネオシールドバッグアダプタ 品番: JV-NSBA 梱包単位: 25個×10箱=250個 医療機器届出番号: 34B1X00001000086	 販売名 ネオシールド輸液セット フィルタ無/品番: JY-NP322F3NS フィルタ付/品番: JY-NFP322F3NS ポンプ用/品番: JP-NP322F3NS 梱包単位: 10本×10箱=100本 医療機器認証番号: 225AABZX00017000
--	--	--	--	---

Point

閉鎖式
レバーロックの
しくみ

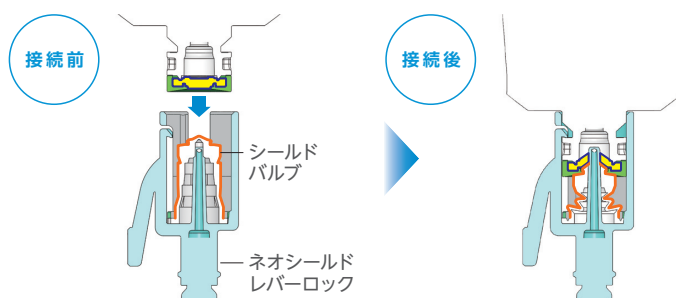

挿入部に先端を保護する
シールドバルブを採用。専用
コネクタに接続することで、
付け外しのときにも閉鎖状態
を維持します。

【NEOSHIELD】「ネオシールド」は、株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス

〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
<http://www.jms.cc/>