

使用方法

1.専用チューブのプライミング

- 1 専用チューブと専用ボトルを接続します。



専用チューブのロック部分を持ちます。



専用チューブのメスコネクタをまっすぐ専用ボトルの投与口へ突きあたるまで挿入します。



押し込んだ状態で右に回転させ、専用ボトル投与口の突起(ツメ)と接続します。接続できた場合はカチッと感があります。

カチッ
- 2 ボトルを架台に装着し、専用チューブのクランプを完全に閉じます。


- 3 専用ボトルのふたを開け、ボトルフロートを取り出してから、あらかじめ調製しておいた栄養剤等を汚染に注意して注入口からボトルに充填します。


- 4 ボトルフロートを栄養剤等の液面中央に浮かべてふたをします。


- 5 注入器を両口キャップに接続してからクランプを開け、注入器の押し子を引き、専用チューブ内を栄養剤等で充填します。充填後はクランプを閉じてから注入器をはずします。



2.専用チューブの装着

- 1 カバーロックを押してロックを解除し、カバーを完全に開いてから、専用チューブをセットします。


- 2 専用チューブが確実にセットされていることを確認してからカバーを完全に閉めます。



3.注入開始

- 1 ハンドルの軸受部をローラヘッド軸に差し込みます。



- 2 専用チューブの両口キャップを外し、オスコネクタを胃瘻栄養用チューブ等に確実に接続してから、専用チューブのクランプを開け、片手で本体をしっかり押さえながら、ハンドルを右回転させ、注入します。



4.注入終了(専用チューブの取り外し)

- 1 注入が終了した後、専用チューブのクランプを閉じてから専用チューブのオスコネクタを胃瘻栄養用チューブ等から外し、ハンドルをローラヘッド軸から外します。


- 2 カバーロックを押してロックを解除し、カバーを完全に開いたら、専用チューブを本品から取り外し、カバーを閉めます。

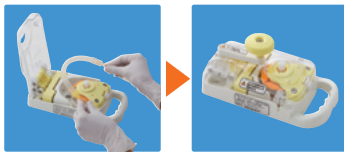

※詳細は取扱説明書をご参照ください。

■規格一覧

品番	JANコード	質量	寸法	梱包単位
JM-PA	4987494087105	約830g (ハンドル含)	収納時:230[W]×110[H]×115[D]mm 操作時:230[W]×125[H]×115[D]mm	1台

販売名:ジェイフィード ペグアシスタ

医療機器届出番号:34B1X00001000077

■関連製品

品番	JANコード	型式	規格	梱包単位
JF-YSL80PAC01	4987494085699	専用チューブ	DEHPフリー カテーテルアダプタ	10本×10箱=100本
JF-FP060PA	4987494085712	専用ボトル	600mL QL 架台 フロート付	2個×10箱=20個
JF-SY50VZ	4987494065233	50mL キャップ付		50本×6箱=300本


販売名:ジェイフィード ペグアシスタ専用栄養セット

販売名:ジェイフィード注入器

医療機器届出番号:34B1X00001000078

医療機器届出番号:34B1X00001000070

製品の仕様及び外観は、品質・性能改良のため予告なく変更することがあります。

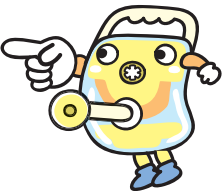

「ペグアシスタ®」に関するお問い合わせはこちらまで。

半固形状流動食注入システム

ペグアシスタ®

家族と同じ食事を、より安全・簡単に。

半固形状流動食
注入システム

ペグアシスタ[®]

さまざまな形態の半固形状流動食を

安全に

簡単に

一定量

短時間で

無駄なく

いつでも

どこでも 投与できます



チューブ内圧が高まると安全機構が働き、チューブ内圧の上昇を防止します。(除圧機構)



ハンドルを逆回転(左回し)させても空回りするため、逆流(胃からの吸引)を防止します。(ワンウェイクラッチ機構[逆回転空回り機構])



専用のチューブをセットしてハンドルを回転させることで、粘度の高い栄養剤でも注入が可能です。



電力を使わないため、電源がない場所でも使用可能です。

ミキサー食など粘度の高い半固形状流動食を投与する際の負担を軽減します。


ペグアシスタ



半固形状流動食やミキサー食等を簡単に投与できる手動式注入ポンプです。安全機構としてワンウェイクラッチ機構(逆回転空回り機構)と除圧機構を装備しています。



ペグアシスタ 専用チューブ

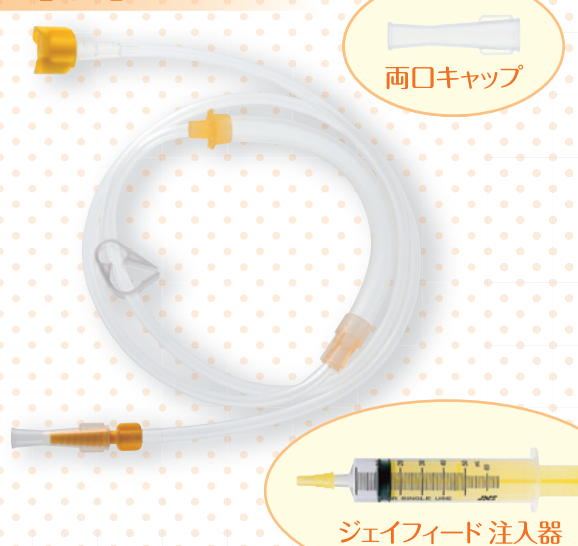

両口キャップ

ジェイフィード注入器

ペグアシスタにセットして使用する専用チューブです。先端についている両口キャップはジェイフィード注入器に接続してプライミングを行う際に使用します。専用チューブのプライミングボリュームは約25mLです。

ペグアシスタ 専用ボトル



フロート

専用ボトルにはフロートがついており、粘度の高い栄養剤等を注入する際にしやすい空気層を防止し、残液を最小限に抑え、無駄なく注入できます。ボトルの容量は600mLで、ボトルの中で栄養剤の調製も可能です。