



UG

Micro-Thin Powder Free

手術用手袋 マイクロ・シン パウダーフリー

SINGLE

MICROSURGERY

DOUBLE

あらゆるシーンで使える安全・安心のユーティリティグローブ



SINGLE



MICROSURGERY



DOUBLE

製品特徴

- 術中交換、二重装着、ぬれた手での装着を容易にするために、内面にポリウレタンによるポリマー・コーティングをしています。
- 無影灯や、マイクロサージャリー下での反射による眩しさを防ぐためにブラウンカラーを採用しています。
- 非常に薄く、触覚感度に優れているので、マイクロサージャリーに最適です。
- ラテックスアレルギー、化学物質アレルギー感作の危険を極力下げるため、独自の特別洗浄を実施し、ラテックス蛋白や化学物質を極力除去しています。
- 独自の手型により、二重装着の際の圧力を軽減しています。
- シュアフィット技術によるカフのロールダウン対策をしています。



規格

販売名：マイクロ・シン パウダーフリー

品番	サイズ	JANコード
JG-MTUGSP55	5 1/2	4987494266838
JG-MTUGSP60	6	4987494266845
JG-MTUGSP65	6 1/2	4987494266852
JG-MTUGSP70	7	4987494266869
JG-MTUGSP75	7 1/2	4987494266876
JG-MTUGSP80	8	4987494266883
JG-MTUGSP85	8 1/2	4987494266890

医療機器認証番号：219ADBZX00160000

50双/箱・4箱(200双/ケース)

使用上・保管上の注意

- 本品は天然ゴム製であり、過去にアナフィラキシー様症状の経験がある医療従事者の使用、及び患者への使用はしないでください。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状をまれに起こす可能性があります。アレルギー性症状には、I型(即時型：天然ゴムラテックスに含まれるたん白による)、IV型(遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による)があります。このような症状を起こした場合には、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 二分脊椎症患者等の天然ゴムと接触する機会が多い方は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意してください。
- 本品は使用1回限りですので再使用はしないでください。
- 本品は必ず医師の監督下において使用してください。
- 使用方法及び、その他の使用上の注意については、箱の添付文書情報を必ずお読みください。
- 水ぬれに注意し、高温、多湿な場所、及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保管してください。
- 包装が破損、汚損している場合、及び製品に破損、変形、ピンホールなどの異常が認められる場合は使用しないでください。

※「GAMMEX」はアンセルリミテッドの登録商標です。