


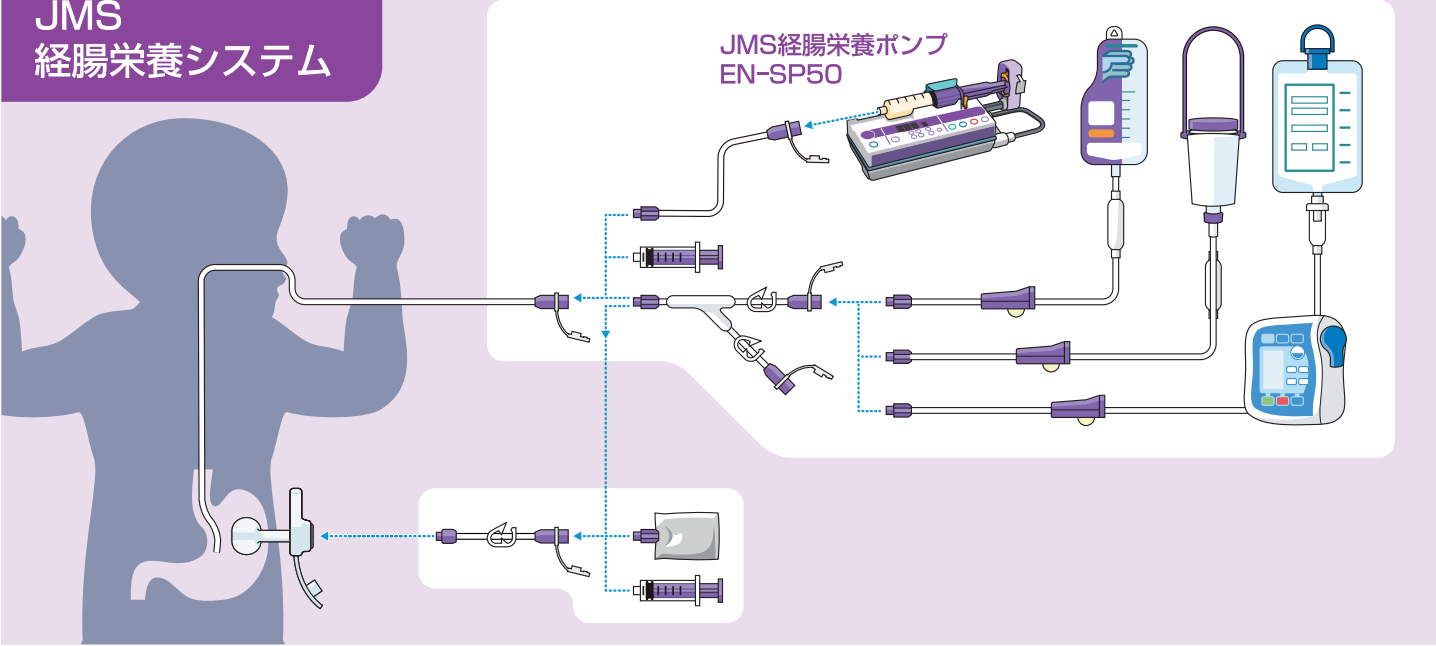

装置仕様	
販売名	JMS経腸栄養ポンプ EN-SP50
品番	JM-ENSP50
医療機器承認番号	30300BZX00052000
使用可能シリンジ	ジェイフィード®ENシリンジ 10、20、30、50mL （製造販売業者：株式会社ジェイ・エム・エス）
流量精度	シリンジを含む精度：±3%以内 （新品のシリンジを使用し、1.00mL/h以上の一定流量にて送液開始1時間以降の1時間ごとの精度）
機械精度	機械精度：±1%
流量設定機能設定範囲	0.1～300.0mL/h（0.1mL/hステップ） 流量上限値設定機能を使用して0.1～999.0mL/hの範囲で早送り流量まで変更可能
積算量表示機能表示範囲	0.1～999.9mL
閉塞圧検出精度	[H]：120±30 kPa（900.1±225.0 mmHg）（1.22±0.31kgf/cm ² ） [M]：80±25 kPa（600.1±187.5 mmHg）（0.82±0.26kgf/cm ² ） [L]：40±20 kPa（300.0±150.0 mmHg）（0.41±0.20kgf/cm ² ）
早送り流量	10mLシリンジ：300mL/h 20mLシリンジ：300、500mL/h 30mLシリンジ：300、700mL/h 50mLシリンジ：300、1200mL/h
保護機能	低優先度アラーム：薬液残量警報/操作忘れ警報/バッテリー残量警報 その他保護機能：再警報
高優先度アラーム	閉塞警報/薬液残量警報/シリンジセット不良警報/シャットダウン警報
付帯機能	シリンジサイズ表示機能/スタンバイモード/桁上げ安全機能/閉塞圧検出レベル表示機能/閉塞モニタ表示機能/閉塞圧検出レベル自動切替機能/閉塞圧検出レベル切替機能/ 送液中流量設定機能/薬液残量警報発生時間切替機能/電源コード外れ検出機能/バッテリー残量表示機能/シャットダウン機能/バッテリーリフレッシュ機能/ バッテリーリフレッシュ時期表示機能/キーロック機能/ボイスナビゲーション機能/ボイスナビゲーション音量切替機能/おやすみモード/警報音量切替機能/表示明るさ切替機能/ 積算量クリア機能/外部通信機能/外部コントロール機能/ヒストリ機能/ヒストリ表示機能/ナースコール機能/総合メンテナンス時期表示機能/日付時刻設定機能/ 早送り流量切替機能/流量上限値設定機能/操作忘れ警報発生条件切替機能/操作忘れ警報発生時間設定機能/スタンバイモード時間切替機能/桁上げ安全機能オンオフ切替機能/ 送液中流量設定機能オンオフ切替機能/バッテリーリフレッシュタイマー設定機能/バッテリーリフレッシュ情報表示機能/警報音量（おやすみモード）切替機能/警報音色H切替機能/ 警報音色L切替機能/ボイスナビゲーション音量（おやすみモード）切替機能/ボイスナビゲーションオンオフ切替機能/おやすみモード時間設定機能/外部通信設定機能/ 外部コントロールロックオンオフ切替機能/再警報発生時間設定機能/表示明るさ（おやすみモード）切替機能/総駆動時間表示機能/メンテナンスタイマー機能/ メンテナンスタイマー設定機能/シリアル番号表示機能
電源	AC電源：100V±10% 50または60Hz 内蔵バッテリー（Ni-MH電池）：9.6V 約1900mAh 約8時間（新品バッテリー、6時間以上充電、流量5.0mL/h、周囲温度25℃） DC電源（専用電源使用時）：15V
消費電力	28VA（AC電源時）、14W（DC電源時）
分類	クラスⅠ機器および内部電源機器、CF形装着部、IPX4（防まつ）
EMC規格	IEC 60601-1-2:2007、JIS T 0601-2-24:2018
外形寸法	223（幅）×123（高さ）×110（奥行）mm（突起部含まず）
重量	約1.6kg



2003 医療事故防止対策通知※対応

本マークは医療事故対策のために設定された厚生労働省基準に適合することを示す業界の自主的なマークです。

※関連企業を対象とした厚生労働省通知「輸液ポンプ等に関する医療事故防止対策について」
医薬発第0318001号：平成15年3月18日



販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
お問い合わせ先
カスタマーサポートセンター ☎0120-923-107

製造販売業者
大研医器株式会社
大阪府和泉市あゆみ野 2-6-2

ジェイフィード®ENシリンジ専用〈シリンジポンプ型〉 JMS経腸栄養ポンプ EN-SP50




ジェイフィード®ENシリンジ専用の経腸栄養ポンプが登場！

NICU領域などで、ミルクや栄養剤等を持続的に一定の流量で注入したいときに便利です。



小型軽量ボディ

重量わずか1.6kgの小型軽量ボディにより、持ち運びの負担を軽減し、落下のリスクを低減します。

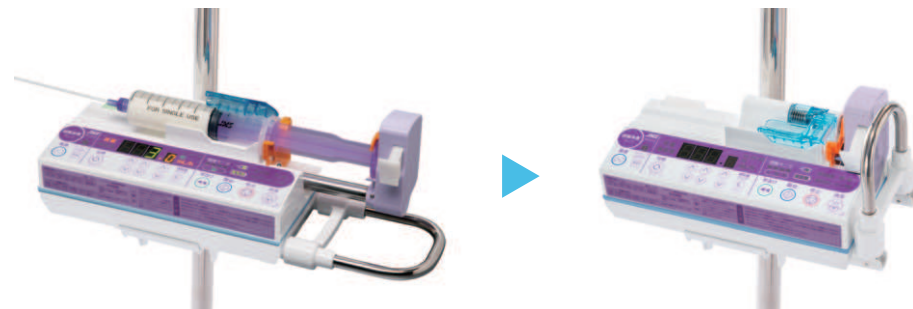

持ち手は格納式を採用しており、収納時の省スペース化に貢献します。



ユーザーフレンドリーなデザイン

- ・上下のバーがシリンジ押し子をしっかりとホールドし、不意な脱落を防ぎます。
- ・透明のシリンジクランプにより、シリンジ内の栄養剤等の残量が容易に確認できます。
- ・大型のパイロットランプにより、運転状態やアラームを素早く直感的に認識できます。




上下のバーでシリンジ押し子を
しっかりホールド



透明なシリンジクランプ



大型のパイロットランプ

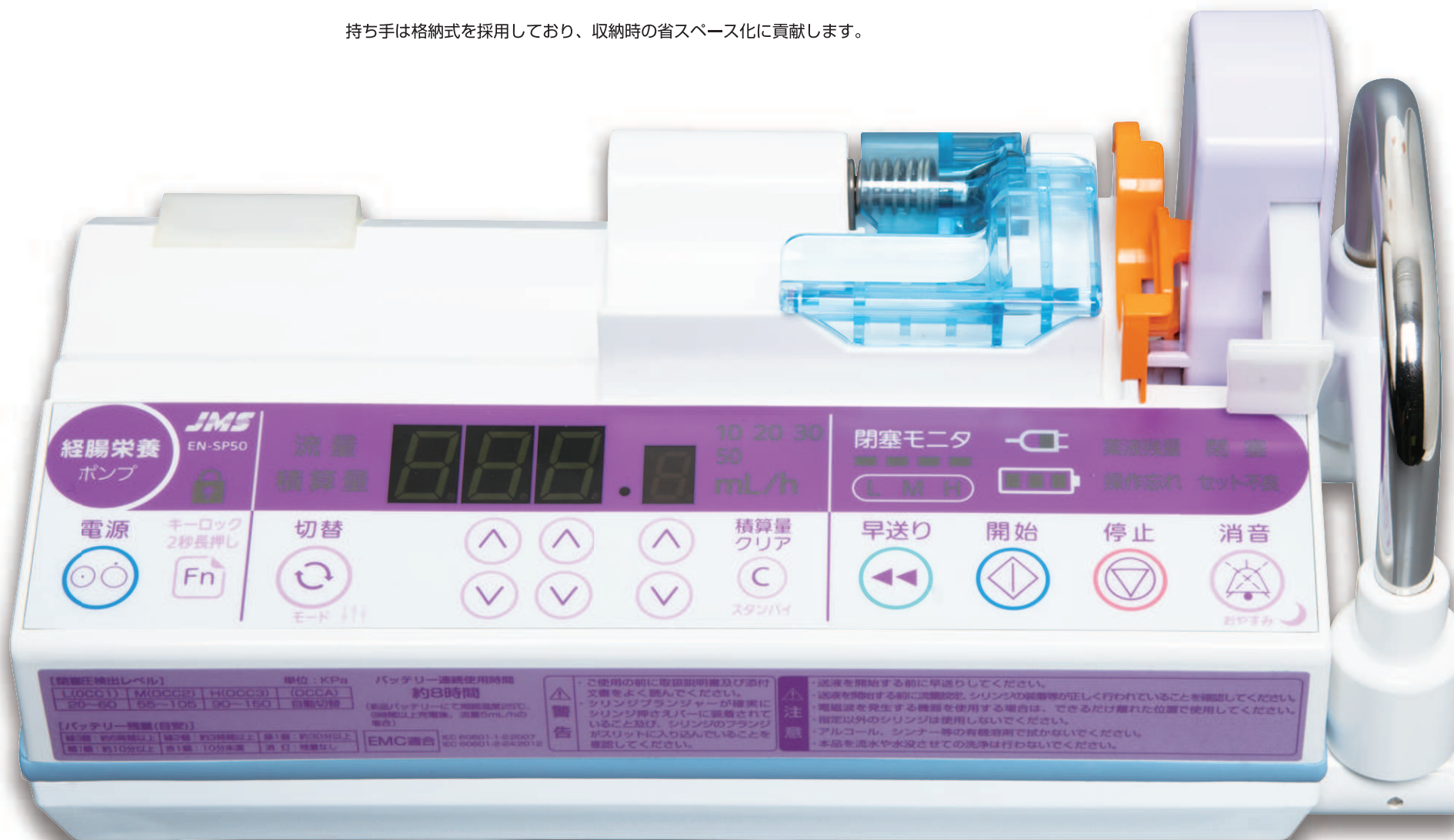

経腸栄養専用の閉塞圧検出設定

閉塞圧検出設定は栄養剤等投与を考慮した3段階の設定



ボイスナビゲーション機能

ポンプの状態や警報を音声でお知らせし、安全な操作をサポートします。



おやすみモード

おやすみモード時は静寂な夜間に合わせた表示の明るさと音量を設定でき、患者の安眠を妨げません。



経腸栄養専用カラー

色調はジェイフィード®ENシリンジに合わせ、紫色を採用

●原寸サイズ