



誤穿刺防止機構付

JMS AVフィスチュラ

ウイングイーター[®]



WingEater[®]






誤穿刺防止機構付

針管をウイングイーター®に収納することにより、
透析終了後から廃棄までの針刺し事故を防止します。

穿刺針の収納方法

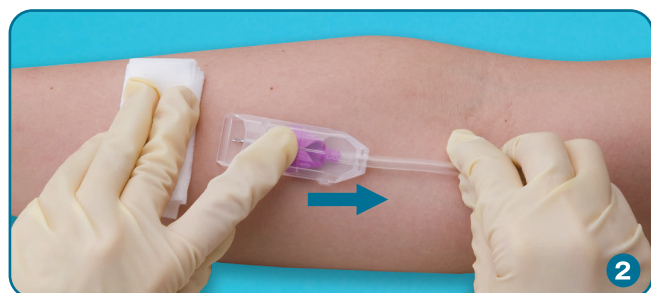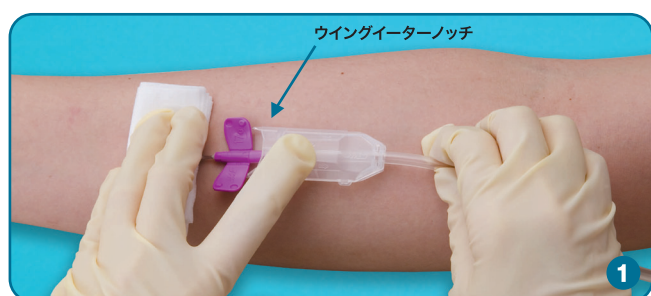

- ① 穿刺した状態でウイングイーター®を翼の位置に移動します。
- ② 穿刺部をガーゼで押さえ、人差し指をウイングイーターノッチにかかるように置きます。
- ③ もう一方の手でチューブ(連結管)を引っ張り、翼及び針管をウイングイーター®に完全に収納します。
- ④ チューブ(連結管)を持ち、血液垂れに注意して容器などに廃棄します。

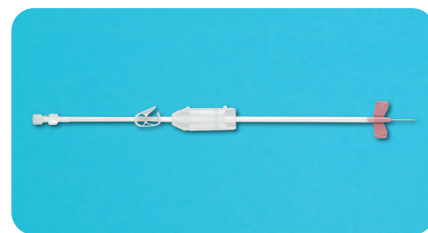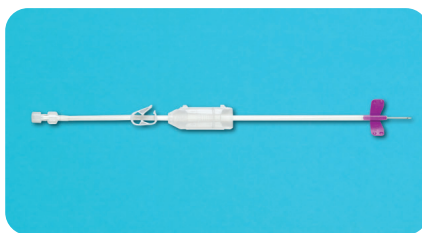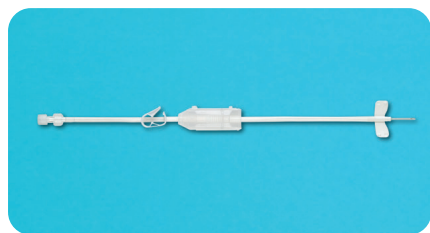

種 類	品 番	針管の長さ	ウイングカラー	梱 包
16Gスリット(1.6mm)	JA-ASW6-W	25mm	ホワイト	50本×10=500本
17Gスリット(1.4mm)	JA-ASW7-W	25mm	レッドバイオレット	50本×10=500本
18Gスリット(1.2mm)	JA-ASW8-W	25mm	ピンク	50本×10=500本

医療機器承認番号21500BZZ00294000