




誤穿刺防止機構付

JMS AVフィスチュラ

SysLocMINI
シスロックミニ

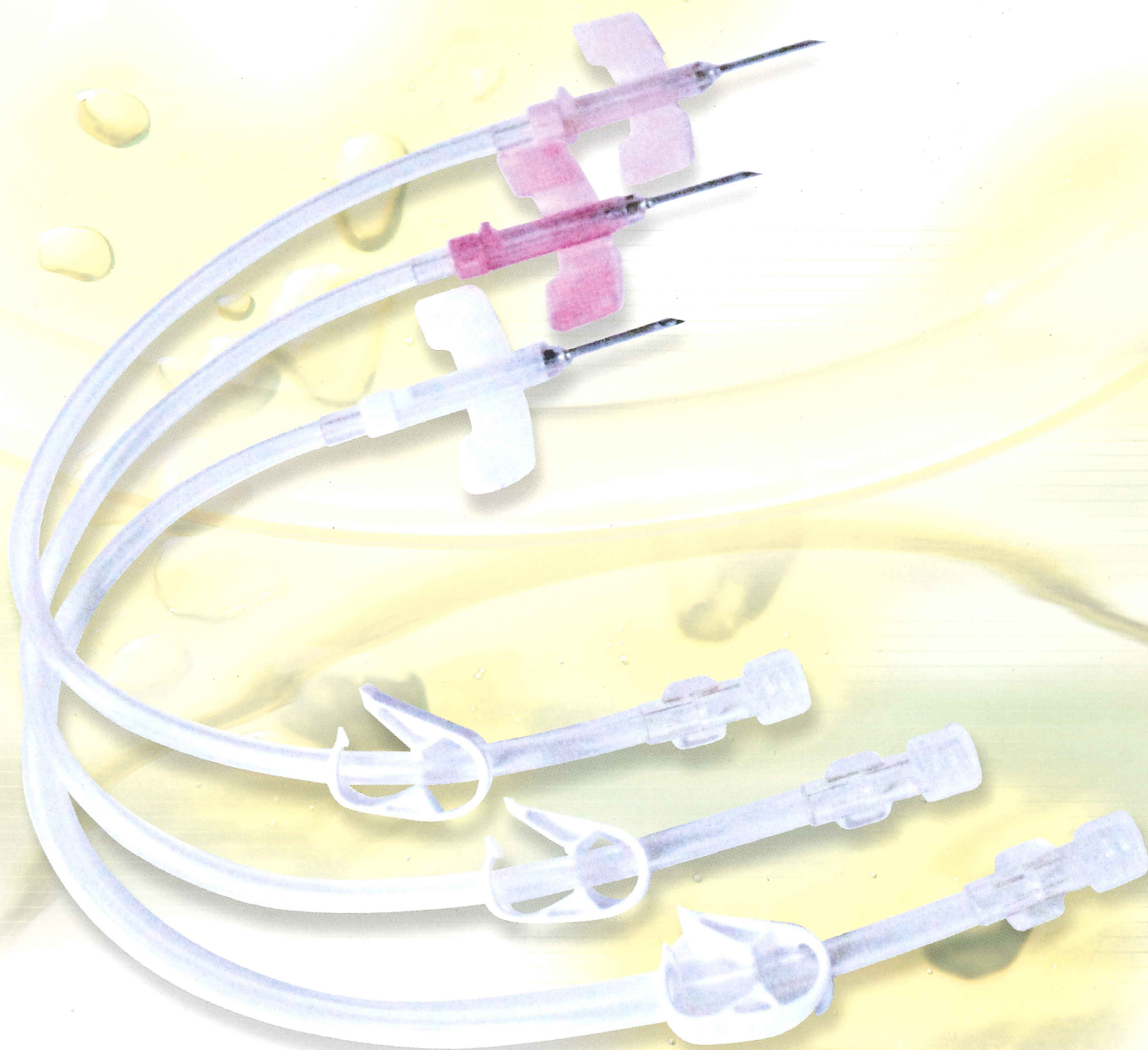


誤穿刺防止機構付

針管を翼内に収納・ロックすることにより、
透析終了後から廃棄までの針刺し事故を防止します。

操作方法

1 穿刺方法

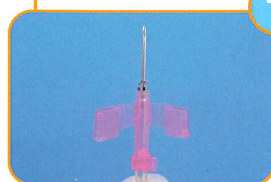

翼のロックが閉じていることを確認し、針管に手を触れないよう針力バーを取外します。



*このようにロックが外れている場合はご使用にならないで下さい。




翼をしっかり持ち、針管の刃面を上にして血管に穿刺します。
※針基の黒マークが刃面です。

2 穿刺針の収納方法




穿刺部をガーゼで押さえ、翼が回転しないように翼と突起(の側面)を押さえながらロックを開きます。

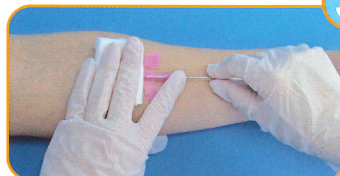

もう一方の手で連結管を引っ張り針管の刃先までさやに収納します。※カチッと音がするまで、完全に入れて下さい。



穿刺部をガーゼで押さえながら翼の突起の後ろに指をかけて翼を固定します。

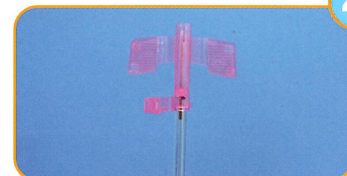

連結管を持ち、血液垂れに注意して廃棄します。

取扱いの4つのポイント

1. 使用前にロックが閉じていることをご確認ください。
2. 穿刺後、ウイング部及び延長管(チューブ)の固定を確実に実施して下さい。
3. 抜針時には、“カチッ”という音がするまでしっかりと針を収納して下さい。
4. 一度ロックを外したものはご使用にならないで下さい。



販売名	型 式	品 番	JANコード	入数	ウイングカラー
JMS AVフィスチュラ	SYS16GX22mm300Wスリット	JA-ASM6-W	4987494054411	50	ホワイト
JMS AVフィスチュラ	SYS17GX22mm300Wスリット	JA-ASM7-W	4987494054428	50	レッドバイオレット
JMS AVフィスチュラ	SYS18GX22mm300Wスリット	JA-ASM8-W	4987494054435	50	ピンク

医療機器認証番号：21500BZZ00294000
ク ラ ス 分 類：Ⅱ 管理医療機器



<http://www.jms.co.jp>

製造販売元
株式会社 ジェイ・エム・エス

お問い合わせ先
東京本社 第二営業部 TEL (03) 6404-0602
〒140-0013 東京都品川区南大井1丁目13番5号 新南大井ビル

2009.11.02XB049-LP
2014.11.01XB049-LP