

● APDシステム



販売名称	型 式	入数/箱	品 番	物流JANコード	薬価基準収載 医薬品コード	承認番号
ペリセート360N 腹膜透析液	A1500mL STD TCD	4	JC-A36N15STCD	4987494217700	3420415A3045	22100AMX00523000
	A2000mL STD TCD	4	JC-A36N20STCD	4987494217755	3420415A4041	22100AMX00523000
	A3000mL STD TCD	3	JC-A36N30STCD	4987494217892	3420415H1040	22100AMX00523000
ペリセート400N 腹膜透析液	A1500mL STD TCD	4	JC-A40N15STCD	4987494218073	3420416A3040	22100AMX00524000
	A2000mL STD TCD	4	JC-A40N20STCD	4987494218721	3420416A4046	22100AMX00524000
	A3000mL STD TCD	3	JC-A40N30STCD	4987494219001	3420416H1045	22100AMX00524000
ペリセート360NL 腹膜透析液	A1500mL STD TCD	4	JC-A36L15STCD	4987494219247	3420426A4040	22100AMX00521000
	A2000mL STD TCD	4	JC-A36L20STCD	4987494219698	3420426A6042	22100AMX00521000
	A3000mL STD TCD	3	JC-A36L30STCD	4987494220021	3420426A8045	22100AMX00521000
ペリセート400NL 腹膜透析液	A1500mL STD TCD	4	JC-A40L15STCD	4987494220267	3420427A4044	22100AMX00522000
	A2000mL STD TCD	4	JC-A40L20STCD	4987494220359	3420427A6047	22100AMX00522000
	A3000mL STD TCD	3	JC-A40L30STCD	4987494220717	3420427A8040	22100AMX00522000

販売名称	型 式	入数/ 箱	品 番	JANコード	医療機器承認番号	クラス分類
APD装置 PD-Mini Neo	PD-05	1	JM-PDMININEO	4987494046751	21900BZX01248000	Ⅲ:高度管理医療機器
APD回路 PD-Mini	APDラインセット	10	JC-IAPDTT	4987494184118	21000BZZ00218000	Ⅲ:高度管理医療機器
JMS CAPD コネクティング システム	TCD用Yセット (PP)	30	JC-YTCDP	4987494221363	21500BZZ00601000	Ⅲ:高度管理医療機器
	TCD用延長チューブ(PP) ※排液バッグ付	5	JC-ETCDP	4987494224081	21500BZZ00601000	Ⅲ:高度管理医療機器
	TCD用延長チューブ(PP) ※排液バッグなし	5	JC-ETCDPN	4987494221370	21500BZZ00601000	Ⅲ:高度管理医療機器

※1 レンタルに対応しています。

●規格について予告なしに変更する場合があります。



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
お問い合わせ先
東京本社 TEL (03)6404-0602
〒140-0013 東京都品川区南大井1丁目13番5号 新南大井ビル



2013.06.03×C136-LP
2017.07.03×C136-RA

人と医療のあいだに...



JMS無菌接合装置

HOTNAVI®



JMS無菌接合装置HOTNAVI®は、自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)において、透析液バッグ交換時に透析液バッグおよびチューブの接合・切離しを、無菌状態で、簡単に行うことができる装置です。

液晶
タッチパネル

動作状態、警報、ガイド等、多様な画面表示で操作をサポート。

ナビ
(ガイド)機能

手技に合わせたイラスト表示により、操作を忘れた場合もマニュアル代わりに。操作画面に合わせて音声で案内。

運転中


接合準備

接合

接合終了

警報

ガイド

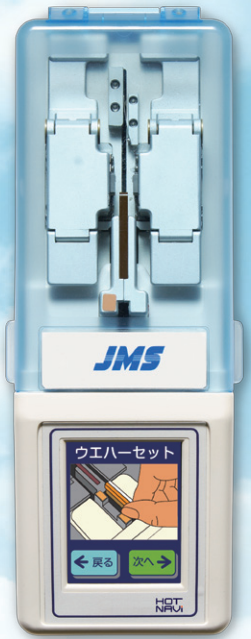


バッテリー内蔵

バッテリー内蔵により、急な外出、災害、停電時に即時、使用可能。

- 1回の充電で8回のバッグ交換が可能。
- 通常充電はACアダプタをつなぐだけ。(使用後、ACアダプタをつないでおけば、次のバッグ交換までに自動充電。)
- 急いで満充電したい場合は、約3.5時間で急速充電。(約10分の急速充電で1回のバッグ交換が可能。)


※充電が不足している場合は使用できません。

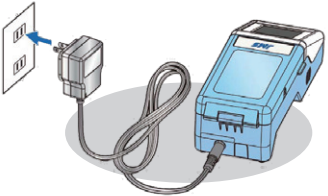

■仕様	
＜分類・適合規格等＞	
販売名	JMS無菌接合装置
医療機器届出番号	34B1X00001000079
一般的名称	腹膜灌流回路用加熱溶融接合装置
クラス分類	クラスⅠ：一般医療機器
特定保守管理医療機器	非該当
電撃保護の形式・装着部の分類	①ACアダプタで使用する場合 クラスⅡ機器 BF形装着部 ②内蔵バッテリーで使用する場合 内部電源機器 BF形装着部
電気的定格	本品は、内蔵バッテリーで駆動し、交流電源は充電時のみに使用する。 ①交流電源 定格電圧 : AC100V 定格周波数 : 50/60Hz 最大消費電力 : 58W ②内蔵バッテリー(Ni-MH電池) 定格電圧 : DC12V 定格容量 : 1650mAh 動作可能回数 : 接合または切り離しの各1回を1セットとして、8セットの動作が可能。 (新品バッテリー、満充電状態、周囲温度25℃)
電磁両立性(EMC)	IEC 60601-1-2 : 2001およびAmendment1 : 2004
寸法・重量	①JMS無菌接合装置 ・寸法 : 長さ299×幅113×高さ86(mm) ・重量 : 1.8kg ②ACアダプタ ・寸法 : 長さ55×幅51.3×高さ65(mm) ・ケーブル長さ : 2m ・重量 : 150g
耐用期間	5年 [自己認証(当社データ)による] ただし、使用上の注意を守り、指定の保守・点検並びに消耗品の交換を実施した場合の期間である。


＜品目仕様等＞	
定格電源	DC18V、最大58W
保管環境	周囲温度 : 0~50℃ 相対湿度 : 10~90%(ただし、結露なきこと)
使用(動作時)環境	周囲温度 : 10~40℃ 相対湿度 : 30~75%(ただし、結露なきこと)
適用ウエハー	・販売名「CAPD交換セット TCDウエハー」 (届出番号 : 34B1X00001000002)
適用チューブ	・販売名「JMS CAPDエクステンションチューブ」 (承認番号 : 16300BZZ01080000) ・販売名「APD回路 PD-Mini」 (承認番号 : 21000BZZ00218000) ・販売名「JMS CAPDコネクティングシステム」 (承認番号 : 21500BZZ00601000) ・販売名「ペリセート360NL腹膜透析液」 (承認番号 : 22100AMX00521000) ・販売名「ペリセート400NL腹膜透析液」 (承認番号 : 22100AMX00522000) ・販売名「ペリセート360N腹膜透析液」 (承認番号 : 22100AMX00523000) ・販売名「ペリセート400N腹膜透析液」 (承認番号 : 22100AMX00524000)
接合モード	接合部気密性 : 49kPa以上 接合後送液時間 : 元のチューブの200%以内の送液時間 接合部引張強さ : 37N以上の強度 接合開始時ウエハー温度 : 約300℃
切り離しモード	切り離し部気密性 : 49kPa以上 切り離し開始時ウエハー温度 : 約300℃
ACアダプタ(型式 : MPU12A-107)	入力 : AC100V(AC100~240V)、50/60Hz(47~63Hz) 出力 : DC18V、最大12W

● 器材一覧

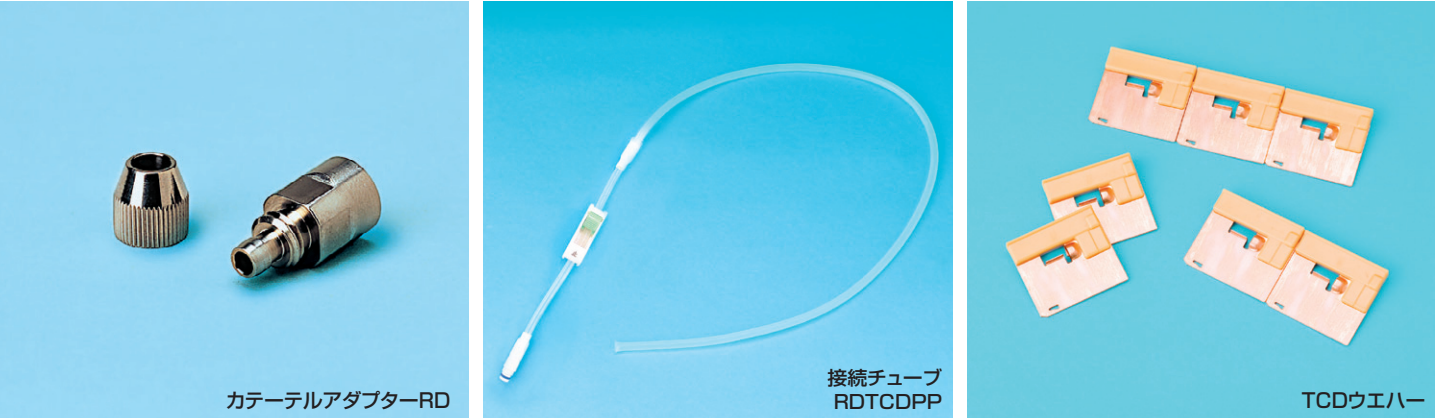

販売名称	型式	入数/箱	品番	JANコード	医療機器承認番号	クラス分類
JMS CAPDシステム	カテーテルアダプターRD	1	JC-IARD	4987494164271	16100BZZ00696000	Ⅲ：高度管理医療機器
JMS CAPDコネクティングシステム	接続チューブRDTCDPP	1	JC-IERDTCDP	4987494021758	21500BZZ00601000	Ⅲ：高度管理医療機器
CAPD交換セットTCDウエハー		60	JC-IBTCD	4987494008575	34B1X00001000002	Ⅰ：一般医療機器

● ツインバッグシステム

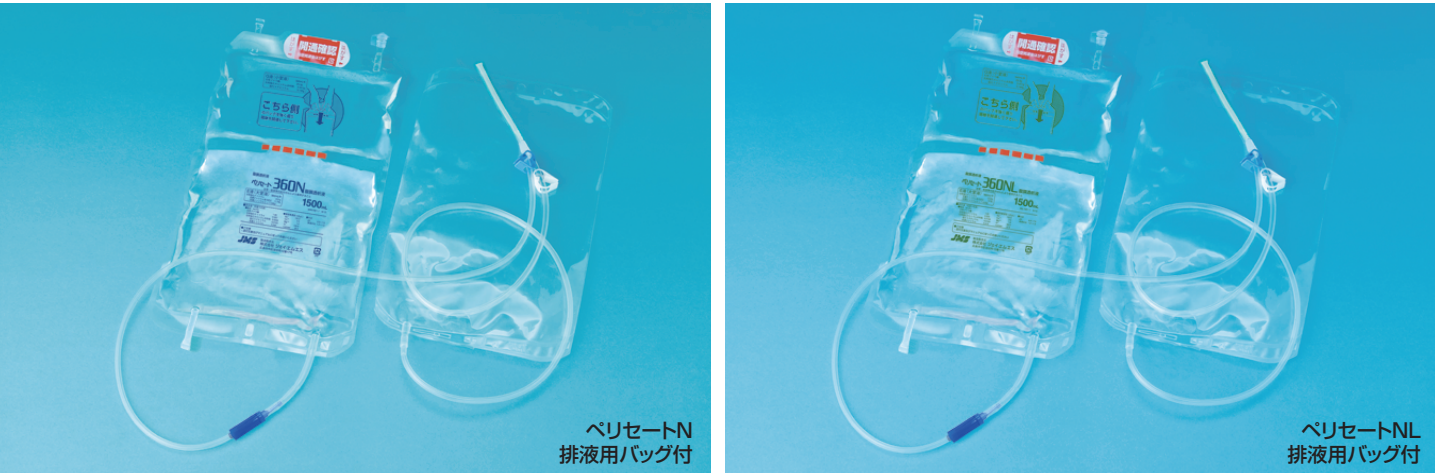

販売名称	型式	入数/箱	品番	物流JANコード	薬価基準収載医薬品コード	承認番号
ペリセート360N腹膜透析液	A1500mL 排液用バッグ付 TCD	4	JC-A36N15TWTC	4987494221592	3420415A7040	22100AMX00523000
	A2000mL 排液用バッグ付 TCD	4	JC-A36N20TWTC	4987494222582	3420415A8047	22100AMX00523000
	A2500mL 排液用バッグ付 TCD	4	JC-A36N25TWTC	4987494223756	3420415H6034	22100AMX00523000
ペリセート400N腹膜透析液	A1500mL 排液用バッグ付 TCD	4	JC-A40N15TWTC	4987494224173	3420416A7045	22100AMX00524000
	A2000mL 排液用バッグ付 TCD	4	JC-A40N20TWTC	4987494224197	3420416A8041	22100AMX00524000
	A2500mL 排液用バッグ付 TCD	4	JC-A40N25TWTC	4987494224616	3420416H3030	22100AMX00524000
ペリセート360NL腹膜透析液	A1500mL 排液用バッグ付 TCD	4	JC-A36L15TWTC	4987494225255	3420426A5046	22100AMX00521000
	A2000mL 排液用バッグ付 TCD	4	JC-A36L20TWTC	4987494225569	3420426A7049	22100AMX00521000
	A2500mL 排液用バッグ付 TCD	4	JC-A36L25TWTC	4987494226764	3420426H1030	22100AMX00521000
ペリセート400NL腹膜透析液	A1500mL 排液用バッグ付 TCD	4	JC-A40L15TWTC	4987494226849	3420427A5040	22100AMX00522000
	A2000mL 排液用バッグ付 TCD	4	JC-A40L20TWTC	4987494226894	3420427A7043	22100AMX00522000
	A2500mL 排液用バッグ付 TCD	4	JC-A40L25TWTC	4987494226962	3420427H1035	22100AMX00522000