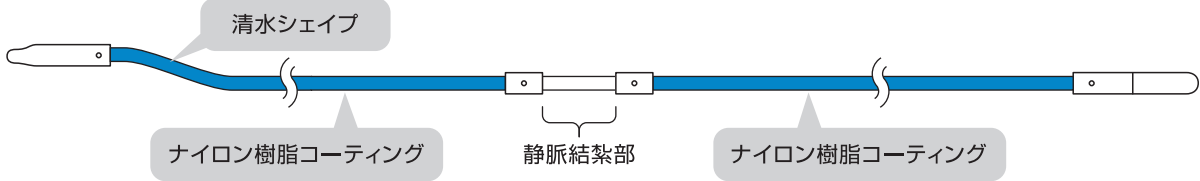
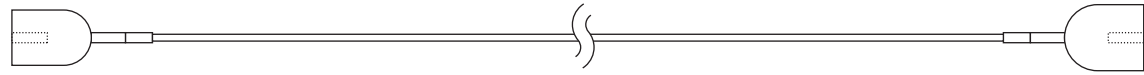


■ JMS ディスポーザブル静脈ストリッパー

				
品 番	規 格	仕 様	梱包単位	JANコード
JX-VSG20CW	直径2.0mm	有効長1150mm, 表面コーティング付き	1本×10 = 10本	4987494079919


医療機器認証番号：21500BZZ00339000

■ SV用 ベル型ヘッド ワイヤ付*

				
品 番	規 格	仕 様	梱包単位	JANコード
JX-VBW0709	7 - 9 mm	全長630mm, ベル型ヘッド径 7mm - 9mm	1本×1 = 1本	4987494079902


* 販売名 JMS ディスポーザブル静脈ストリッパー 医療機器認証番号：21500BZZ00339000

■ JMS 導薬チューブ

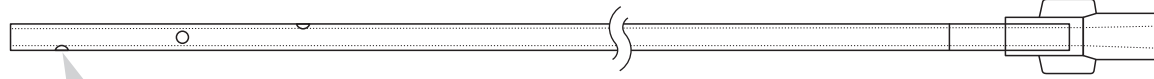				
品 番	規 格	仕 様	梱包単位	JANコード
JX-MT02	M	有効長500mm / サイドホール3穴, 直径2.0mm用	10本×10 = 100本	4987494218226

医療機器承認番号：21500BZZ00145000

■ サイドホールアーチカニューラ

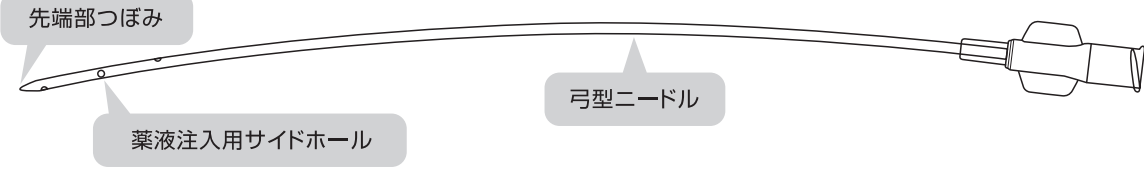				
品 番	規 格	仕 様	梱包単位	JANコード
JX-SHA16	16G	有効長250mm / サイドホール3穴	1本×5 = 5本	4987494326297

医療機器承認番号：30200BZX00281000


下肢静脈瘤治療デバイス Treatment of Varicose Veins

下肢静脈瘤の短期滞在手術 / 高い根治性と低侵襲を両立

内翻式ストリッパーをはじめ、下肢静脈瘤治療における 短期滞在型手術を実現するために必要なデバイスを幅広くLINE-UP。

JMS ディスポーザブル静脈ストリッパー

表面のコーティングと先端部のオリジナル形状によって、血管内のワイヤー通過性に優れています。ワイヤーの中央部に 静脈結紮部を設けたために逆方向からの静脈抜去も容易に出来ます。

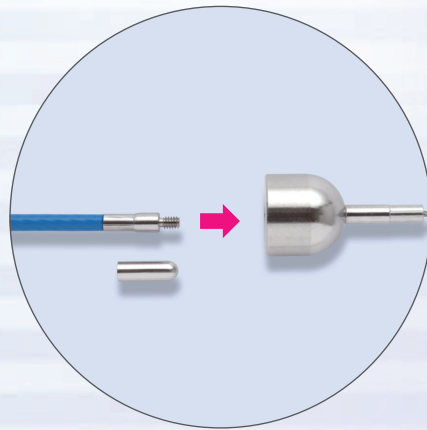

SV用 ベル型ヘッド ワイヤ付

Babcock法に用いる異径のベル型ヘッドです。



サイドホールアーチカニューラ

大伏在静脈にそってその周囲組織に薬液注入することで、静脈抜去時の出血及び疼痛を緩和させ、さらに静脈と周辺組織との剥離も容易となります。




JMS 導薬チューブ


3個のサイドホールを先端部付近に配し、静脈抜去後ストリッパーに接続し、皮下トンネル内に引き込むことで、薬液注入が可能です。




内翻ストリッピングの基本手技

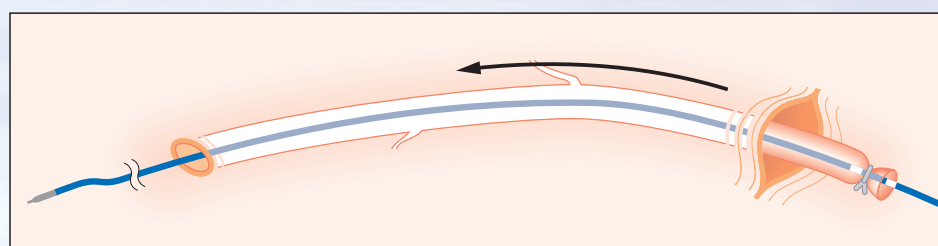

静脈中枢端を“静脈結紮部”に結紮する。

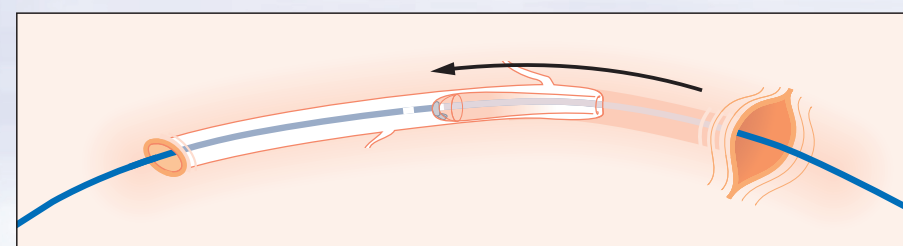

ワイヤーを末端に向け牽引し、静脈中枢端を内翻させる。

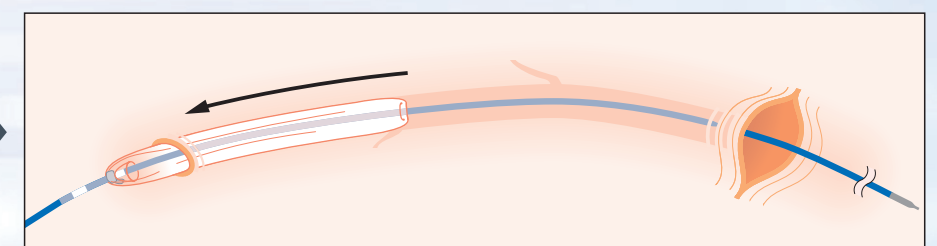

静脈を膝部切開創より抜去する。