

人と医療のあいだに…




マイクロカテーテル

総合カタログ

Nadeshiko

JMS Seamless Micro Catheter Nadeshiko For IVR Therapy

ナデシコ ポジションマップ (300mg I/mL-110cmのときの最大流量までをバググラフで表示)

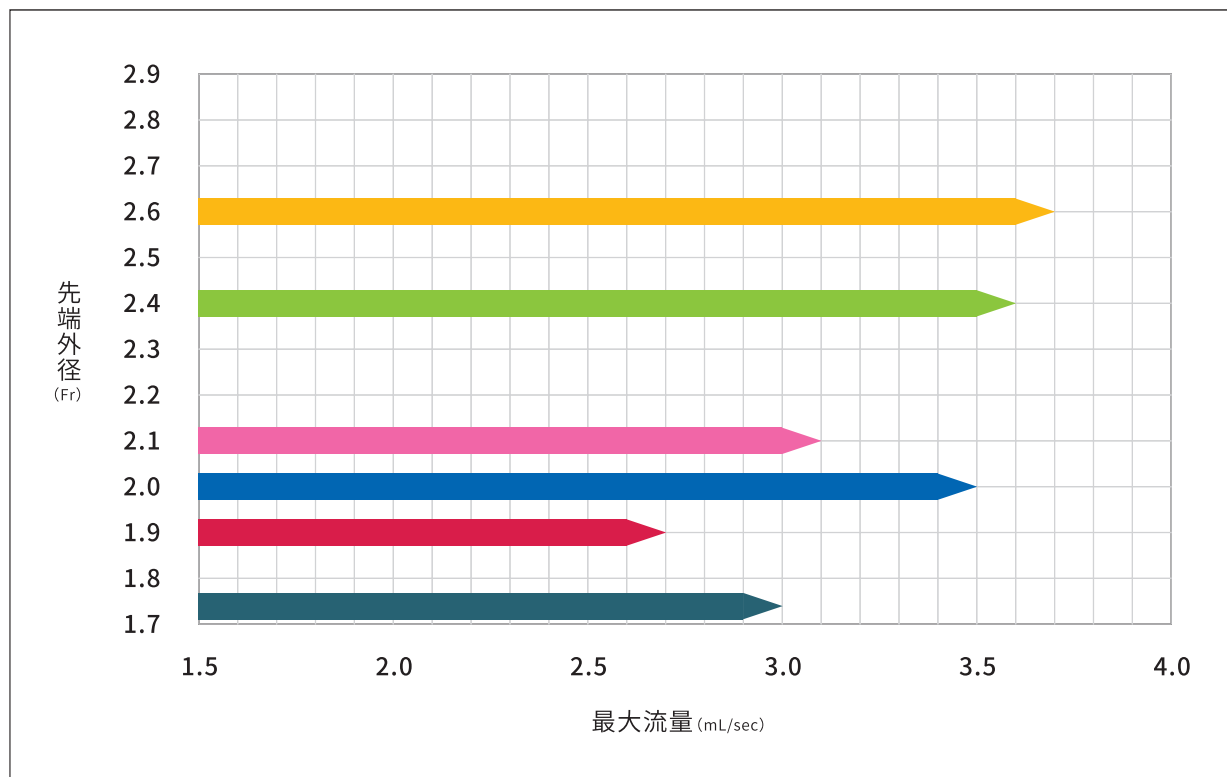

先端形状バリエーション

スワンネック 2.4Fr. 110/135/150 2.1Fr. 110/135/150 2.0Fr. 110/135/150 1.9Fr. 110/135	45° アングル 2.4Fr. 110 2.1Fr. 110/135 2.0Fr. 110/135/150 1.9Fr. 110/135 1.7Fr. 110/135
ダブルアングル (II) 2.4Fr. 110/135/150 2.1Fr. 110/135 2.0Fr. 110/135/150 1.9Fr. 110/135	シェファードフック 2.4Fr. 150 2.1Fr. 150
150° アングル 2.4Fr. 110	

Nadeshiko ハイトロー 2.6Fr.

販売名：ナデシコ

医療機器承認番号：21200BZZ00459000

一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル

- ☐ 造影性と血管選択性のバランスがとれたハイトローマイクロカテーテルです。
- ☐ 手元から先端柔軟部にかけての硬度バランスをシームレスで実現しました。

仕様

先端 細径部長 (cm)	先端 柔軟部長 (cm)	カテーテルサイズ				推奨ガイドワイヤ 最大径 (inch/mm)	親水性コー ティング長	最大耐圧 (psi/kPa)
		先端部外径 (Fr/mm)	手元部外径 (Fr/mm)	先端部内径 (inch/mm)	手元部内径 (inch/mm)			
5	20	2.6/0.88	2.9/0.97	0.025/0.63	0.027/0.69	0.021/0.53	標準	800/5,500

フローレート

造 影 剤 種 類	有 効 長 (cm)	デッドスペース ボリューム (mL)	流量 (mL/sec)	
			600psi (4,200kPa)	800psi (5,500kPa)
イオパミドール 300	110	0.60	3.1	3.7
	135	0.70	2.7	3.3
	150	0.75	2.4	3.1
イオパミドール 370	110	0.60	2.6	2.6
	135	0.70	2.1	2.0
	150	0.75	1.8	1.8

< フローレート測定条件 >

装置：マークVプロビス（メドラッド社製）

操作条件：造影剤温度：37℃、Injection Pressure Limit：600psi, 800psi、Linear Rise：0.3sec

Flow：4.0mL/sec, Injection volume：12mL

※上表の流量は社内試験結果によるものです。実際の使用においては、諸条件により流量が異なる場合があります。

規格

品 番	JANコード	型 式	先 端 形 状	保 険 償 還 分 類
JX-M11112926	4987494038459	2.6F 110cm	ストレート	血管造影用マイクロカテーテル オーバーザワイヤー 造影能強化型
JX-M11132926	4987494038466	2.6F 135cm	ストレート	
JX-M11152926	4987494045051	2.6F 150cm	ストレート	
JX-M97112926	4987494250295	2.6F 110cm	ダブルアングル	

Nadeshiko セレクトティブ 2.4Fr.

販売名：ナデシコ

医療機器承認番号：21200BZZ00459000

一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル

- ☐ ナデシコのロングセラー。

先端柔軟性、血管選択性とフローのバランスに優れたカテーテルです。

- ☐ ナイロンブレードを採用し、耐キンク性と復元性に優れています。

- ☐ アングル、スワンネックやダブルアングルのほかに、

様々な先端形状をラインナップしています。

仕様

先端 細径部長 (cm)	先端 柔軟部長 (cm)	カテーテルサイズ				推奨ガイドワイヤ 最大径 (inch/mm)	親水性コー ティング長	最大耐圧 (psi/kPa)
		先端部外径 (Fr/mm)	手元部外径 (Fr/mm)	先端部内径 (inch/mm)	手元部内径 (inch/mm)			
2	20	2.4/0.80	2.9/0.95	0.021/0.53	0.026/0.65	0.018/0.46	ロング	600/4,200
2	15	2.4/0.80	2.9/0.95	0.021/0.53	0.026/0.65	0.018/0.46	標準	600/4,200
5	15	2.4/0.80	2.9/0.95	0.021/0.53	0.026/0.65	0.018/0.46	標準	1,000/7,000
5	15	2.4/0.80	2.9/0.95	0.021/0.53	0.026/0.65	0.018/0.46	ショート	1,000/7,000

フローレート

造影剤種類	有効長 (cm)	デッドスペース ボリューム (mL)	流量 (mL/sec)		
			600psi (4,200kPa)	800psi (5,500kPa)	1,000psi (7,000kPa)
イオバミドール 300	110	0.58	2.5	3.0	3.6
	135	0.66	2.1	2.7	3.4
	150	0.71	2.0	2.5	3.0
イオバミドール 370	110	0.58	1.6	2.1	2.6
	135	0.66	1.1	1.6	2.0
	150	0.71	0.9	1.4	1.8

<フローレート測定条件>

装置：マークV プロビス（メドラッド社製）

操作条件：造影剤温度：37℃、Injection Pressure Limit：600psi, 800psi, 1,000psi、Linear Rise：0.3sec

Flow：4.0mL/sec, Injection volume：12mL

※上表の流量は社内試験結果によるものです。実際の使用においては、諸条件により流量が異なる場合があります。

規格

品 番	JANコード	型 式	先 端 形 状	保 険 償 還 分 類
JX-M31113025	4987494189588	2.4F 110cm 50mm	ストレート	血管造影用 マイクロカテーテル オーバーザワイヤー 選択的アプローチ型 ブレードあり
JX-M36113025	4987494211890	2.4F 110cm 50mm SC	ストレート	
JX-M91113025	4987494228775	2.4F 110cm 50mm スワン	スワンネック	
JX-M97113025	4987494044016	2.4F 110cm 50mm SCWA2	ダブルアングル(Ⅱ)	
JX-M92113025	4987494233540	2.4F 110cm 50mm 45A	45°アングル	
JX-M95113025	4987494042296	2.4F 110cm 50mm 150A	150°アングル	
JX-M31133025	4987494189663	2.4F 135cm 50mm	ストレート	
JX-M36133025	4987494211920	2.4F 135cm 50mm SC	ストレート	
JX-M91133025	4987494219216	2.4F 135cm 50mm スワン	スワンネック	
JX-M97133025	4987494047901	2.4F 135cm 50mm WA2	ダブルアングル(Ⅱ)	
JX-M31153025	4987494189700	2.4F 150cm 50mm	ストレート	
JX-M91153025	4987494030989	2.4F 150cm 50mm スワン	スワンネック	
JX-M97153025	4987494047802	2.4F 150cm 50mm WA2	ダブルアングル(Ⅱ)※	
JX-M98153025	4987494055548	2.4F 150cm SH	シェファードフック	

※受注生産品となります。

Nadeshiko セレクトティブ 2.1Fr.

販売名：ナデシコ

医療機器承認番号：21200BZZ00459000

一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル

- ☐ 極細のナイロンブレードを採用しており、耐キンク性と復元性に優れています。
- ☐ カテーテル手元から先端柔軟部にかけて滑らかなシャフト硬度変化を実現しています。
- ☐ 独自の内外径ロングテーパー仕様により、高い造影手技をサポートします。

仕様

先端 細径部長 (cm)	先端 柔軟部長 (cm)	カテーテルサイズ				推奨ガイドワイヤ 最大径 (inch/mm)	親水性コー ティング長	最大耐圧 (psi/kPa)
		先端部外径 (Fr/mm)	手元部外径 (Fr/mm)	先端部内径 (inch/mm)	手元部内径 (inch/mm)			
2	15	2.1/0.71	2.9/0.95	0.018/0.46	0.026/0.65	0.016/0.41	標準	800/5,500
2	15	2.1/0.71	2.9/0.95	0.018/0.46	0.026/0.65	0.016/0.41	ショート	800/5,500

フローレート

造影剤種類	有効長 (cm)	デッドスペース ボリューム (mL)	流量 (mL/sec)	
			600psi (4,200kPa)	800psi (5,500kPa)
イオパミドール 300	110	0.55	2.6	3.1
	135	0.63	2.1	2.7
	150	0.68	1.9	2.5
イオパミドール 370	110	0.55	1.5	2.0
	135	0.63	1.1	1.5
	150	0.68	1.0	1.3

<フローレート測定条件>

装置：マークVプロビス（メドラッド社製）

操作条件：造影剤温度：37℃、Injection Pressure Limit：600psi, 800psi、Linear Rise：0.3sec

Flow：4.0mL/sec, Injection volume：12mL

※上表の流量は社内試験結果によるものです。実際の使用においては、諸条件により流量が異なる場合があります。

規格

品 番	JANコード	型 式	先 端 形 状	保 険 償 還 分 類
JX-M11112921	4987494055302	2.1F 110cm 20mm	ストレート	血管造影用 マイクロカテーテル オーバーザワイヤー 選択的アプローチ型 ブレードあり
JX-M81112921	4987494073122	2.1F 110cm 20mm スワンネック	スワンネック	
JX-M97112921	4987494075423	2.1F 110cm 20mm WA2	ダブルアングル(II)	
JX-M11132921	4987494055326	2.1F 135cm 20mm	ストレート	
JX-M81132921	4987494065509	2.1F 135cm 20mm スワンネック	スワンネック	
JX-M97132921	4987494078035	2.1F 135cm 20mm WA2	ダブルアングル(II)※	
JX-M11152921	4987494056446	2.1F 150cm 20mm	ストレート	
JX-M81152921	4987494072231	2.1F 150cm 20mm スワンネック	スワンネック	
JX-M98152921	4987494193745	2.1F 150cm SH	シェファードフック	
JX-M92S12921	4987494068173	2.1F 110cm 20mm 45A	45°アングル	
JX-M92S32921	4987494076802	2.1F 135cm 20mm 45A	45°アングル	

※受注生産品となります。

Nadeshiko

セレクトタイプ 2.0Fr.【3Fr システム対応】



販売名：ナデシコ

医療機器承認番号：21200BZZ00459000

一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル

- ☐ 最大耐圧1,200psi (8,400kPa)によって高いフローを実現しました。
- ☐ ナデシコ独自のシームレスシャフトと大きな先端R形状により、滑らかなシャフト硬度変化と血管選択性を実現しました。
- ☐ 先端形状のバリエーションが豊富です。

仕 様

先端 細径部長 (cm)	先端 柔軟部長 (cm)	カテーテルサイズ				推奨ガイドワイヤ 最大径 (inch/mm)	親水性コー ティング長	最大耐圧 (psi/kPa)
		先端部外径 (Fr/mm)	手元部外径 (Fr/mm)	先端部内径 (inch/mm)	手元部内径 (inch/mm)			
2	15	2.0/0.68	2.4/0.79	0.020/0.51	0.023/0.58	0.018/0.46	標準	1,200/8,400

フローレート

造影剤種類	有効長 (cm)	デッドスペース ボリューム (mL)	流量 (mL/sec)			
			600psi (4,200kPa)	800psi (5,500kPa)	1,000psi (7,000kPa)	1,200psi (8,400kPa)
イオパミドール 300	110	0.47	2.0	2.6	3.1	3.5
	135	0.53	1.6	2.0	2.5	3.0
	150	0.57	1.5	1.9	2.4	2.9
イオパミドール 370	110	0.47	1.0	1.4	1.7	2.4
	135	0.53	0.9	1.2	1.5	2.1
	150	0.57	0.8	1.1	1.4	2.0

< フローレート測定条件 >

装置：マークVプロビス（メドラッド社製）

操作条件：造影剤温度：37℃、Injection Pressure Limit：600psi, 800psi, 1,000psi, 1,200psi、Linear Rise：0.3sec

Flow：4.0mL/sec, Injection volume：12mL

※上表の流量は社内試験結果によるものです。実際の使用においては、諸条件により流量が異なる場合があります。

規格

品 番	JANコード	型 式	先 端 形 状	保 険 償 還 分 類
JX-M11112420	4987494084029	2.0F 110cm ストレート	ストレート	血管造影用マイクロカテーテル オーバーザワイヤー 選択的アプローチ型 ブレードあり
JX-M11132420	4987494084036	2.0F 135cm ストレート	ストレート	
JX-M11152420	4987494084098	2.0F 150cm ストレート	ストレート	
JX-M72112420	4987494084043	2.0F 110cm アングル	45°アングル	
JX-M72132420	4987494084050	2.0F 135cm アングル	45°アングル※	
JX-M72152420	4987494084128	2.0F 150cm アングル	45°アングル※	
JX-M71112420	4987494084111	2.0F 110cm スワン	スワンネック	
JX-M71132420	4987494084104	2.0F 135cm スワン	スワンネック	
JX-M71152420	4987494084166	2.0F 150cm スワン	スワンネック※	
JX-M73112420	4987494084135	2.0F 110cm WA2	ダブルアングル(II)	
JX-M73132420	4987494084142	2.0F 135cm WA2	ダブルアングル(II)	
JX-M73152420	4987494084159	2.0F 150cm WA2	ダブルアングル(II)※	

※受注生産品となります。

Nadeshiko セレクトタイプ 1.9Fr.



販売名：ナデシコ

医療機器承認番号：21200BZZ00459000

一般の名称：中心循環系マイクロカテーテル

- ☐ 先端外径寸法を1.9Frと細径化。シームレスシャフトによる滑らかなシャフト硬度変化によって高い操作性と血管選択性を実現しました。
- ☐ 内径は先端から手元まで0.020inchのノンテーパータイプ。塞栓コイルの使用に適しています。
- ☐ 最大耐圧を1,200psi(8,400kPa)として高いフローを実現しました。

仕 様

先端 細径部長 (cm)	先端 柔軟部長 (cm)	カテーテルサイズ				推奨ガイドワイヤ 最大径 (inch/mm)	親水性コー ティング長	最大耐圧 (psi/kPa)
		先端部外径 (Fr/mm)	手元部外径 (Fr/mm)	先端部内径 (inch/mm)	手元部内径 (inch/mm)			
2	15	1.9/0.64	2.7/0.90	0.020/0.51	0.020/0.51	0.018/0.46	ロング	1,200/8,400
2	15	1.9/0.64	2.7/0.90	0.020/0.51	0.020/0.51	0.018/0.46	標準	1,200/8,400
2	15	1.9/0.64	2.7/0.90	0.020/0.51	0.020/0.51	0.018/0.46	ショート	1,200/8,400

フローレート

造 影 剤 種 類	有 効 長 (cm)	デッドスペース ボリューム (mL)	流量 (mL/sec)			
			600psi (4,200kPa)	800psi (5,500kPa)	1,000psi (7,000kPa)	1,200psi (8,400kPa)
イオパミドール 300	110	0.43	1.4	1.7	2.2	2.7
	135	0.48	1.1	1.5	1.9	2.4
	150	0.52	1.0	1.4	1.5	2.2
イオパミドール 370	110	0.43	0.8	1.0	1.3	1.7
	135	0.48	0.6	0.8	1.1	1.5
	150	0.52	0.5	0.8	1.0	1.3

<フローレート測定条件>

装置：マークVプロビス（メドラッド社製）

操作条件：造影剤温度：37℃、Injection Pressure Limit：600psi, 800psi, 1,000psi, 1,200psi、Linear Rise：0.3sec

Flow：4.0mL/sec, Injection volume：12mL

※上表の流量は社内試験結果によるものです。実際の使用においては、諸条件により流量が異なる場合があります。

規 格

品 番	JANコード	型 式	先 端 形 状	保 険 償 還 分 類
JX-M15112719	4987494096305	1.9F 110cm ストレートSC	ストレート	血管造影用マイクロカテーテル オーバーザワイヤー 選択的アプローチ型 ブレードあり
JX-M11112719	4987494096312	1.9F 110cm ストレート	ストレート	
JX-M81112719	4987494235056	1.9F 110cm スワン	スワンネック	
JX-M82112719	4987494235063	1.9F 110cm アングル	45°アングル	
JX-M93112719	4987494096350	1.9F 110cm WA2	ダブルアングル(II)	
JX-M15132719	4987494096336	1.9F 135cm ストレートSC	ストレート	
JX-M11132719	4987494096329	1.9F 135cm ストレート	ストレート	
JX-M81132719	4987494235070	1.9F 135cm スワン	スワンネック	
JX-M82132719	4987494235087	1.9F 135cm アングル	45°アングル	
JX-M10132719	4987494096343	1.9F 135cm ストレートLC	ストレート	
JX-M11152719	4987494235049	1.9F 150cm ストレート	ストレート	

PEAK HUNTER®

ピークハンター1.7Fr.

販売名：ナデシコ

医療機器承認番号：21200BZZ00459000

一般的名称：中心循環系マイクロカテーテル

☐ 柔軟かつ滑らかなテーパー加工を施し、高いガイドワイヤ追従性を実現しました。

仕 様

先端 細径部長 (cm)	先端 柔軟部長 (cm)	カテーテルサイズ				推奨ガイドワイヤ 最大径 (inch/mm)	親水性 コーティング長	最大耐圧 (psi/kPa)
		先端部外径 (Fr/mm)	手元部外径 (Fr/mm)	先端部内径 (inch/mm)	手元部内径 (inch/mm)			
2	15	1.7/0.58	2.9/0.95	0.017/0.42	0.023/0.59	0.016/0.041	標準:80cm SC:50cm	1200

フローレート

造 影 剤 種 類	有 効 長 (cm)	デッドスペース ボリューム (mL)	流量 (mL/sec)		
			600psi (4,020kPa)	800psi (5,500kPa)	1,000psi (7,000kPa)
イオパミドール 300	110	0.52	1.8	2.2	2.7
	135	0.58	1.5	2.0	2.4
	150	0.61	1.4	1.9	2.3
イオパミドール 370	110	0.52	1.1	1.4	1.8
	135	0.58	0.9	1.2	1.6
	150	0.61	0.8	1.1	1.4

<フローレート測定条件>

装置：マークVプロビス（メドラッド社製）

操作条件：造影剤温度：37℃、Injection Pressure Limit：600psi, 800psi, 1,000psi, 1,200psi、Linear Rise：0.3sec

Flow：4.0mL/sec, Injection volume：12mL

※上表の流量は社内試験結果によるものです。実際の使用においては、諸条件により流量が異なる場合があります。


規 格

品 番	JANコード	型 式	先 端 形 状	保 険 償 還 分 類
JX-M15112917	4987494253661	1.7F 110cm SC	ストレート	血管造影用マイクロカテーテル (1)オーバーザワイヤー 選択的アプローチ型 ブレードあり
JX-M82512917	4987494253678	1.7F 110cm SC	45°アングル	
JX-M11112917	4987494253616	1.7F 110cm	ストレート	
JX-M82112917	4987494253623	1.7F 110cm	45°アングル※	
JX-M15132917	4987494253685	1.7F 135cm SC	ストレート	
JX-M82532917	4987494253692	1.7F 135cm SC	45°アングル	
JX-M11132917	4987494253630	1.7F 135cm	ストレート	
JX-M82132917	4987494253647	1.7F 135cm	45°アングル※	
JX-M11152917	4987494253654	1.7F 150cm	ストレート	
JX-M82152917	4987494261703	1.7F 150cm	45°アングル※	

※受注生産品となります。

Nadeshiko

キットタイプ

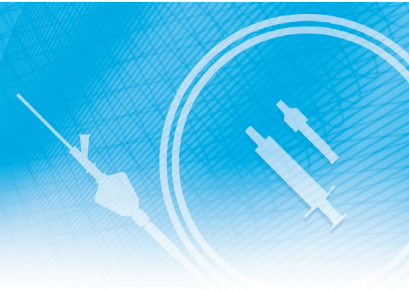

販売名：ナデシコ

医療機器承認番号：21200BZZ00459000

一般の名称：中心循環系マイクロカテーテル

- ☐ マイクロカテーテルに加えて、マイクロガイドワイヤ、止血用押圧器具、止血弁、シリンジ等を一括にパッケージング。
構成品を選択することで、スムーズな手技の実現をサポートします。

規格


ガイドワイヤ付

品番	JANコード	マイクロカテーテル			ガイドワイヤ				
		先端外径	手元外径	有効長 (cm)	外径	先端形状	形状付け 可能長(mm)	柔軟部長 (cm)	有効長 (cm)
JX-M65V12917	4987494280834	1.7F	2.9F	110	0.016" (0.41mm)	ストレート	50	43	150
JX-M65V32917	4987494280841			135					180
JX-M61112719	4987494284931	1.9F	2.7F	110					150
JX-M61132719	4987494284917			135					180
JX-M61112921	4987494281145	2.1F	2.9F	110					150
JX-M61132921	4987494281176			135					180
JX-M61152921	4987494281152			150					180
JX-M61113025	4987494279371			110					150
JX-M61133025	4987494281183	2.4F	2.9F	135					180
JX-M61112420	4987494279364			110					150
JX-M61132420	4987494281121	2.0F	2.4F	135					180

リベルト付一例

品 番	J A N コー ド	外径(Fr)	有効長 (cm)	主要構成
JX-M11B32926	4987494242238	2.6Fr	135cm	リベルト付き
JX-M11B32921	4987494240937	2.1Fr	135cm	リベルト付き
JX-M36B13025	4987494089826	2.4Fr	110cm	リベルト付き
JX-M31B33025	4987494091676	2.4Fr	135cm	リベルト付き
JX-M11B12420	4987494097036	2.0Fr	110cm	リベルト付き
JX-M11B32420	4987494090792	2.0Fr	135cm	リベルト付き
JX-M11B12719	4987494237975	1.9Fr	110cm	リベルト付き
JX-M11B32719	4987494237982	1.9Fr	135cm	リベルト付き
JX-M15B12917	4987494254880	1.7Fr	110cm	リベルト付き
JX-M15B32917	4987494254927	1.7Fr	135cm	リベルト付き

※上記規格は一例です。その他の規格についてはお問い合わせください。

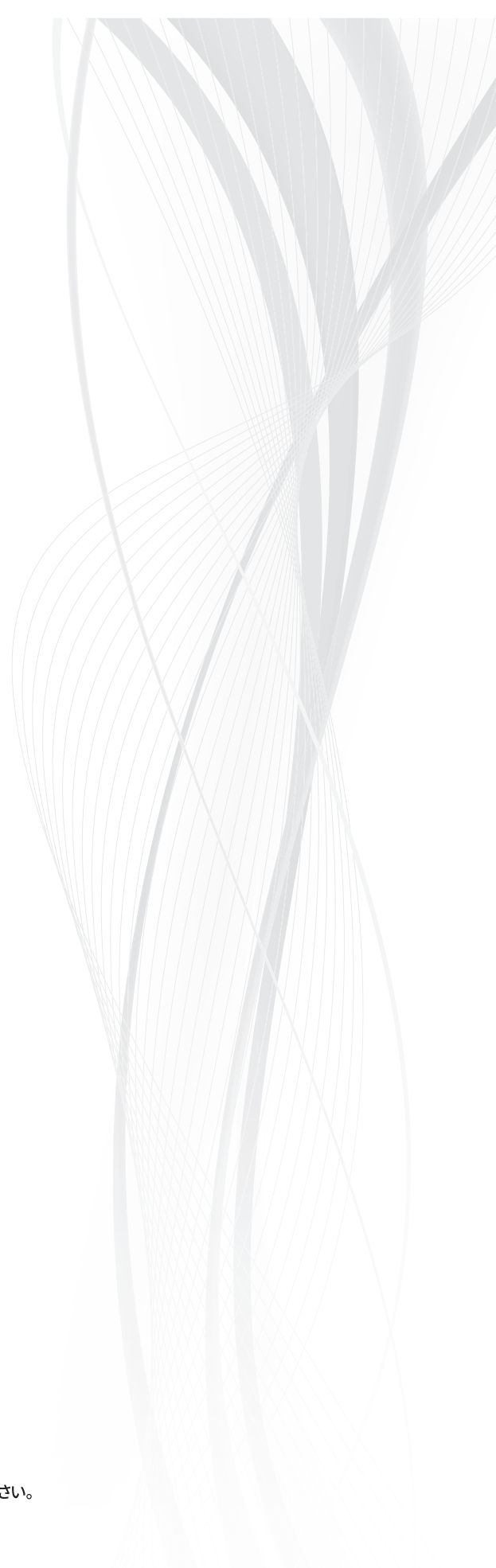

- 製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。
- 記載されていない規格や詳細が必要な場合につきましては、弊社営業担当者までお問い合わせください。



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
〒730-8652 広島市中区加古町12番17号
<https://www.jms.cc>

