

人と医療のあいだに…



止血用押圧器具

リベルト

患者さんへの
やさしさを追求しました




鼠頸部


左右兼用

リベルト 止血用押圧器具


- ベルトを固定する際には、粘着剤が患者さんの皮膚に触れません。
- バルーンが半透明なので、穿刺部位の位置確認が容易です。
- バルーンの空気加圧力を調整することで、患者さんの血圧に応じた圧迫が可能です。
- 圧迫力は別売の加圧器にて数値管理が可能です。

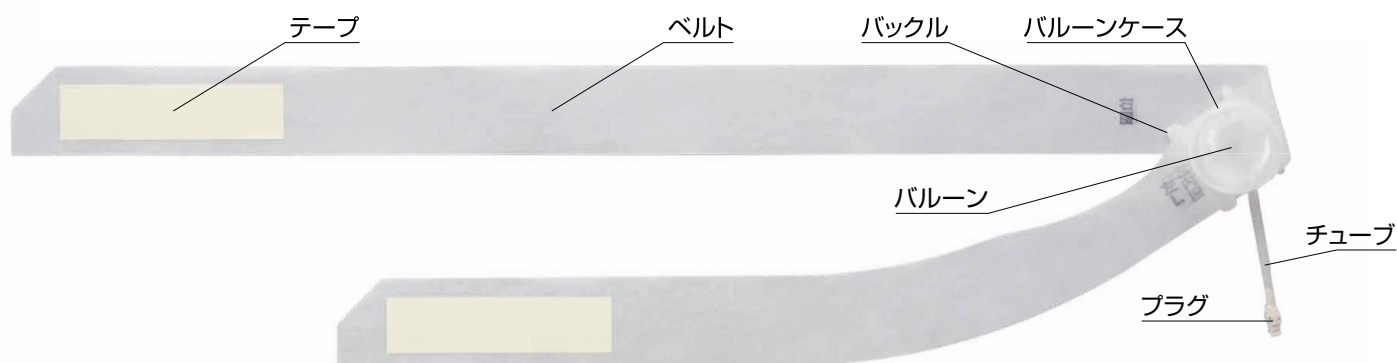


◆ 使用方法

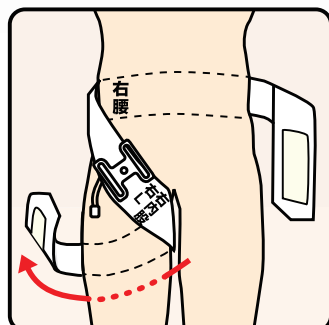


一次止血を行ったガーゼの上にバルーンを中心をのせ、短いベルトを太ももに、長いベルトを腰に廻します。

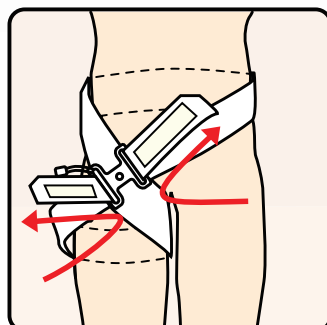

ベルトをバックルに通します。

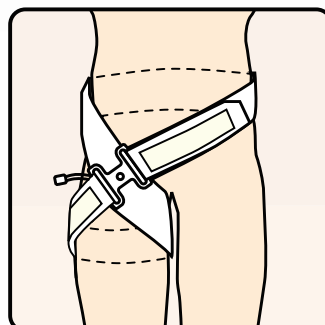

テープの剥離紙をはがし、ベルトに貼り付けて固定します。

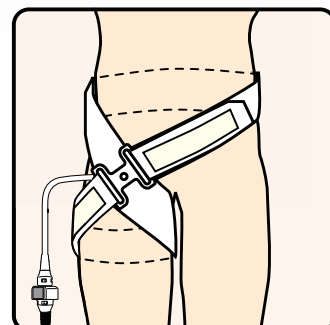

加圧器(別売品)のソケットと止血ベルトのプラグを接続して、必要な圧力までバルーンを加圧した後、加圧器のソケットを取り外します。

◆ 規 格

販売名	リベルト	JANコード	4987494096268
品 番	RB-1005	クラス分類	I 一般医療機器
型 式	左右兼用ロング	梱包単位	1個X6=6個
医療機器届出番号 34B3X10004000100			

※本製品は使用1回限りとなります。

製品改良のため、記載内容の一部を予告なく変更することがあります。



加圧器(別売品)
品番:RK-1007
*非医療機器