


フローレート

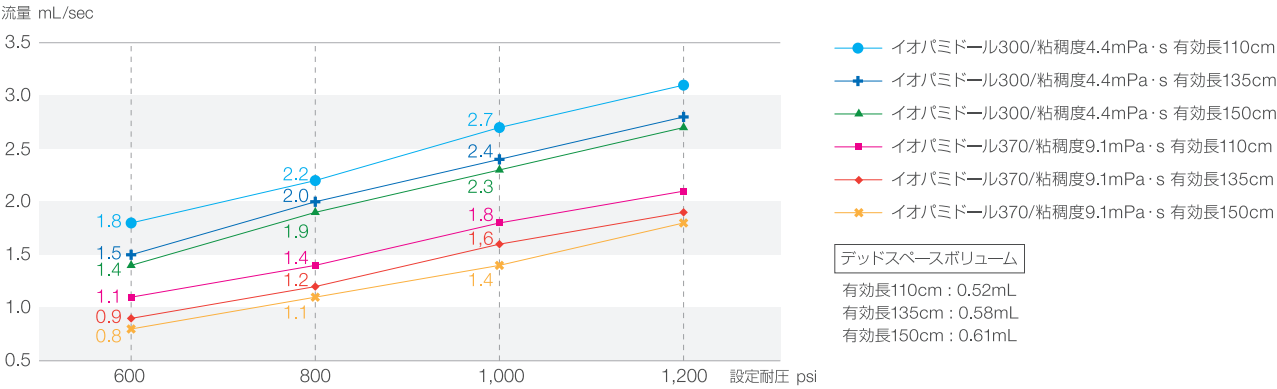

<フローレート測定条件>

装置：マークVフロビス（メドラッド社製） 造影剤温度：37℃

Linear Rise：0.3sec Flow：4.0mL/sec Injection volume：12mL

※グラフの流量は社内試験結果によるものです。実際の使用においては、諸条件により流量が異なる場合があります。

規格一覧

品番	JANコード	有効長 (cm)	親水性 コーティング	先端形状	外径 (F/mm)		内径 (inch/mm)	
					先端部	手元部	先端部	手元部
JX-M15112917	4987494253661	110	ショート	ストレート	1.7/0.58	2.9/0.95	0.017/0.42	0.023/0.58
JX-M82512917	4987494253678			45° アングル				
JX-M11112917	4987494253616		スタンダード	ストレート				
JX-M82112917	4987494253623			45° アングル				
JX-M15132917	4987494253685	135	ショート	ストレート				
JX-M82532917	4987494253692			45° アングル				
JX-M11132917	4987494253630		スタンダード	ストレート				
JX-M82132917	4987494253647			45° アングル				
JX-M11152917	4987494253654	150	スタンダード	ストレート				
JX-M82152917	4987494261703			45° アングル				

リベルト付

品番	JANコード	有効長 (cm)	親水性 コーティング	先端形状	外径 (F/mm)		内径 (inch/mm)	
					先端部	手元部	先端部	手元部
JX-M15B12917	4987494254880	110	ショート	ストレート	1.7/0.58	2.9/0.95	0.017/0.42	0.023/0.58
JX-M15B32917	4987494254927	135						



<製品仕様>

推奨ガイドワイヤ最大径:0.016inch(0.41mm)

推奨ガイドイングカテーテル最小内径:0.038inch(0.97mm)

最大耐圧（先端開放時）:1,200psi(8,400kPa)

付属品:1mLシリンジ1本、インサータ

販売名:ナデシコ 医療機器承認番号:21200BZZ00459000 一般的名称:中心循環系マイクロカテーテル

保険償還区分:血管造影用マイクロカテーテル オーバーザワイヤー／選択的アプローチ型／ブレードあり

- 外観・仕様は予告なしに変更することがあります。●カタログの写真は印刷物のため実際のものとは異なる場合があります。
- ご使用に際しては、本品の添付文書をご参照ください。●PEAKHUNTERは株式会社ジェイ・エム・エスの登録商標です。



目的はより末梢へ。

たとえ困難で険しい道のりでも、必ず山頂を目指し、

たどり着く。そんな登山家をピークハンターという。

複雑に入り組んだルートを進み、

狭く曲がりくねった道も柔軟に対応。

マイクロカテーテル PEAK HUNTERは

超選択的症例に最適なパートナーです。


血管選択の新たな可能性

CHARACTERISTICS

高いガイドワイヤ追従性を実現

柔軟かつ滑らかなテーパ加工を施したカテーテル先端部は、血管選択性の向上だけでなく、血管壁刺激も軽減します。

超選択的TACE施行例


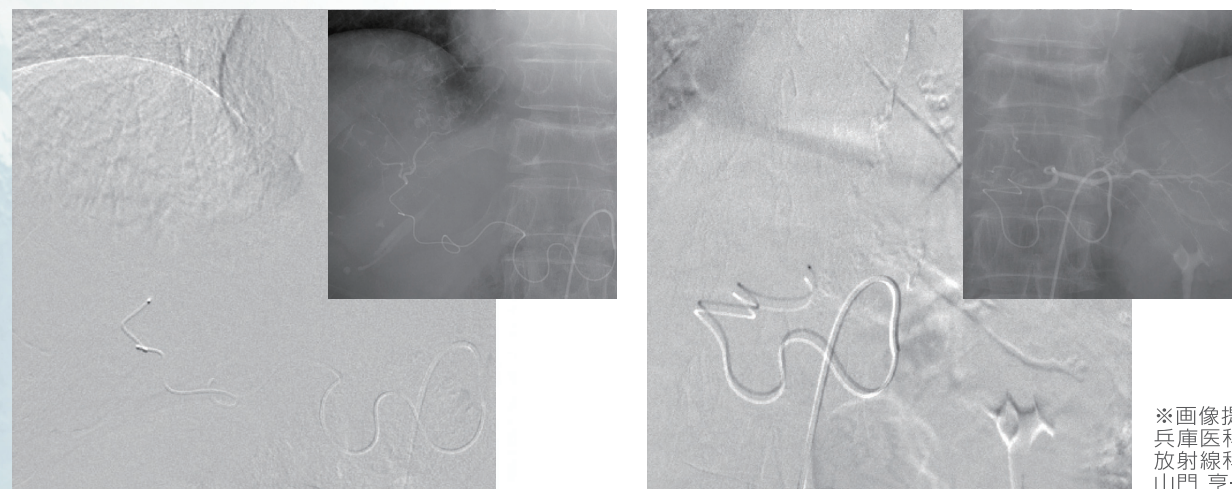


※画像提供
兵庫医科大学病院
放射線科
山門 亨一郎 先生

◆ 柔軟な先端部

試験方法 ※当社試験


シャフト先端を
10mm突き当た
際の最大値を
硬度として測定

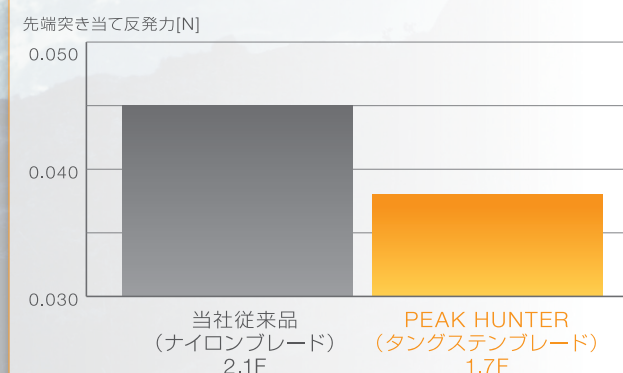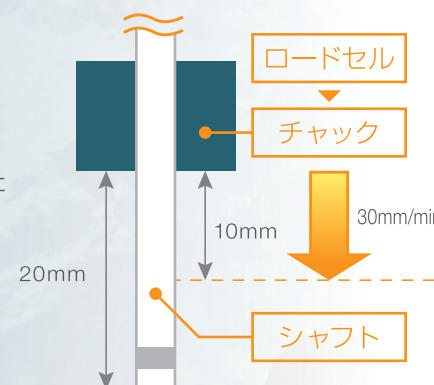


◆ ガイドワイヤとの段差を軽減

試験方法 ※当社試験

※0.016inch/0.41mm
当社ガイドワイヤ使用

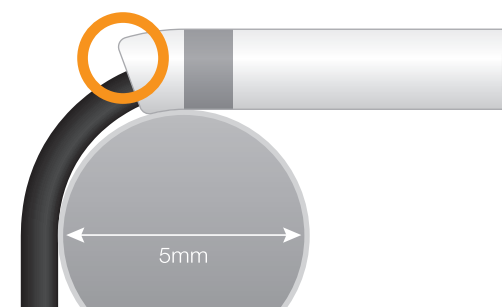

PEAK HUNTER(1.7F)

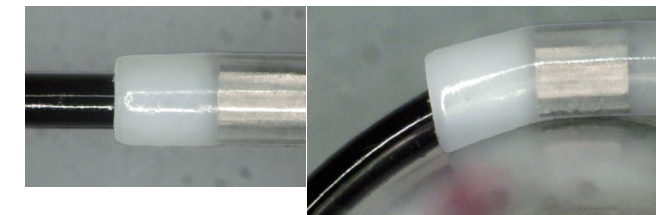

当社従来品(1.9F)

