

MEDICAL DEVICES

ボーンマロウコレクションキットについて

製品一覧

品番	販売名
J6R2107	ボーンマロウコレクションキット
X6R2105	ボーンマロウコレクションスタンド（非医療機器）

承認情報・仕様

一般的名称	単回使用骨髄採取・移送セット
販売名	ボーンマロウコレクションキット
医療機器認証番号	20500BZY00152000

ボーンマロウ コレクションキット



ボーンマロウ コレクションキット — 骨髓液収集・ろ過システム


シンプルな2ステップ工程

3種類のフィルターを備えたボーンマロウコレクションキットは、移植用の骨髓液の収集とろ過の操作を容易にします。

- 採取された骨髓液を容量1200mLのコレクションコンテナーに移します。
- コンテナー内の骨髓液は重力落差でろ過され、トランスファーパックコンテナーに集められます。

重力による自然なるろ過は、手術室における手間と時間を軽減します。また、ディスポーザブルのキットは、滅菌されており、無菌エリアでの使用に適するようラッピングされています。

ボーンマロウコレクションキットは、接続の容易なコネクター付きの独立したフィルターで構成されています。

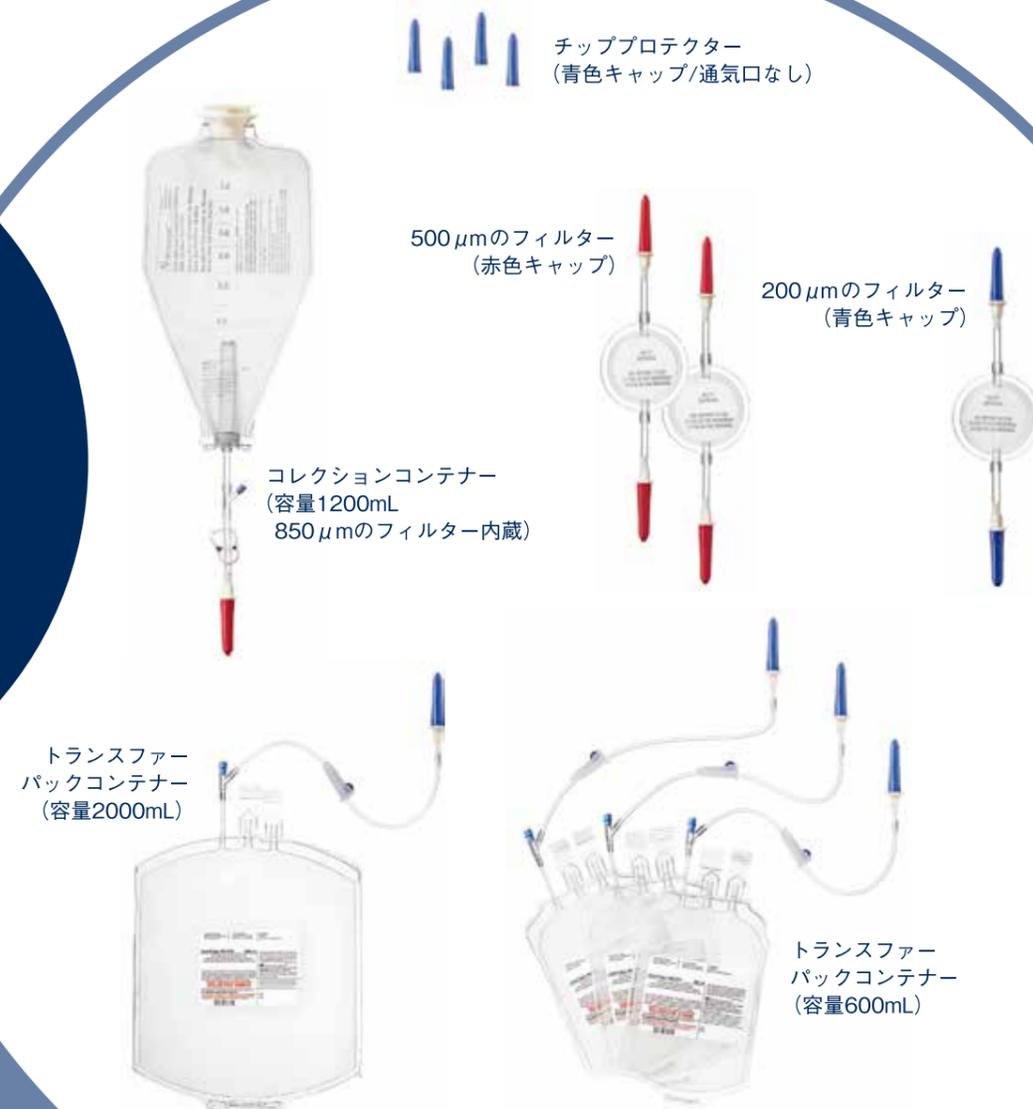

ボーンマロウコレクションキットの特長

- 部材のセットアップ**
骨髓液の収集とろ過に求められる必要最小限の部材をワンパッケージにまとめました。
- ディスポーザブルセット**
単回使用の簡便なキットです。
- 簡便な収集**
キャップ付きの広口のコレクションコンテナーは骨髓液の収集を容易にします。
- ろ過前後のサンプリング**
コレクションコンテナーとトランスファーパックコンテナーに付属のサンプリングポートからサンプリングが可能です。
- コレクションコンテナーのフィルター**
850µmのフィルターにより目詰まりを防止します。
- 重力落差によるフロー**
500µmと200µmのメッシュフィルターによるろ過により更に目詰まりを防ぎます。

再使用可能なステンレス製のボーンマロウコレクションスタンド(滅菌可)も別途用意しております。

