

単回使用縫合糸パサー

INNERSURE ACE

JMS インナーシュアーエース

確実強固な腓管吻合をサポートします




単回使用縫合糸パサー


INNERSURE ACE




- 細く柔らかい樹脂製の挿入部が、**挿入操作**を容易にします。
- 伝達ロスを最少にした設計が、**拡張操作**を容易にします。
- 独自のループ形状が、術野の**視野**を確保します。

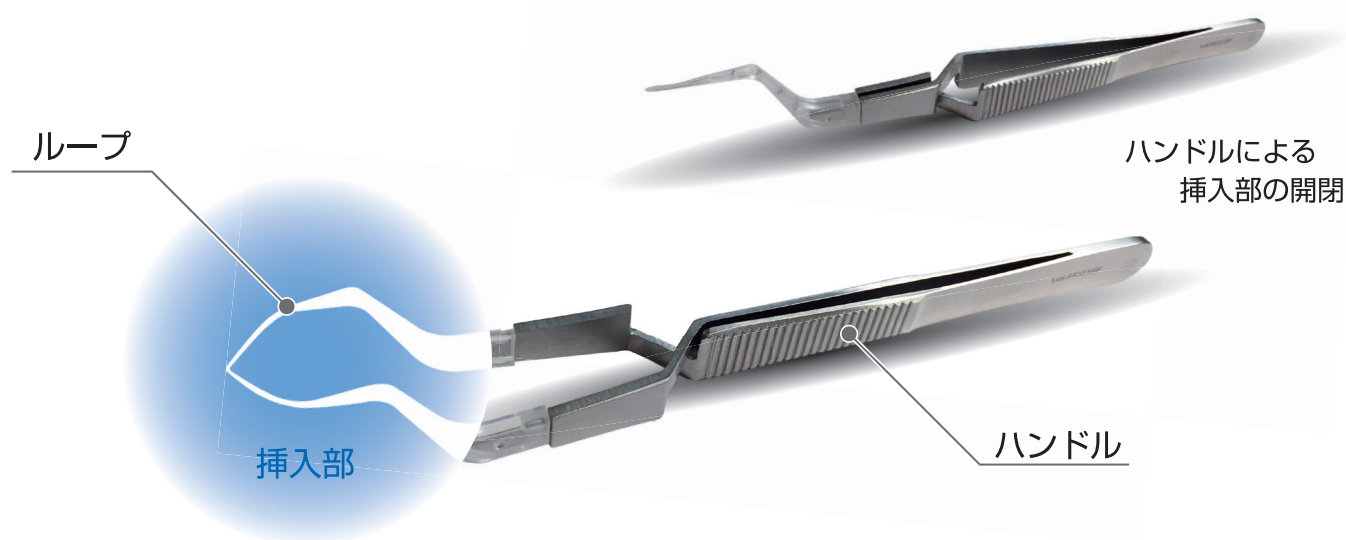


使用方法

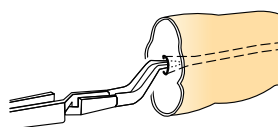


挿入部を瘻管に挿入して、周囲の組織を損傷しないよう注意しながらハンドルを閉じて挿入部を拡張します。

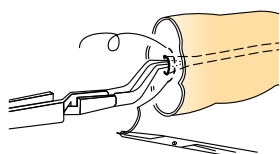

拡張した挿入部の間を通るように、瘻管に縫合糸を貫通させます。

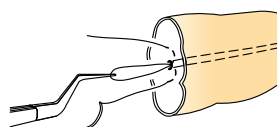

ハンドルを開いて挿入部を閉じ、縫合糸を瘻管から必要長引き出して切断します。

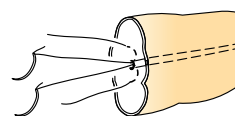

挿入部から縫合糸を外し、切断した縫合糸に縫合針を装着します。

規格

販売名	JMS インナーシュアーエース
品番	JHSA001
JAN コード	4987494284610
医療機器認証番号	228AABZX00118000

クラス分類	Ⅱ 管理医療機器
梱包単位	1 本 × 4 箱 = 4 本



製造販売業者
株式会社 ジェイ・エム・エス
<http://www.jms.cc>

〒140-0013 東京都品川区南大井1丁目13番5号 新南大井ビル